

Vorbereitung der Xpert[®]-Kartusche

- Xpert Xpress SARS-CoV-2
- Xpert Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV
- Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV *plus*
- Xpert Xpress CoV-2 *plus*

Ausführliche Anweisungen, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise sind der Packungsbeilage zu entnehmen.

Ein Exemplar des SDB (Sicherheitsdatenblatts) ist auf www.cepheid.com oder www.cepheidinternational.com abrufbar.

Die Kontaktinformationen aller Vertretungen des technischen Kundendiensts von Cepheid finden Sie auf unserer Website: www.cepheid.com/en/CustomerSupport.




- 1 Für jede Probe eine Xpert Kartusche verwenden.



- 2 Das Röhrchen 5-mal rasch invertieren.




- 3 Den Kartuschendeckel öffnen.

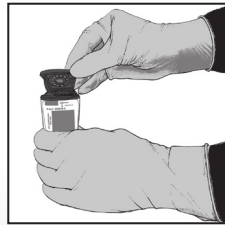

- 4 Mit einer sauberen 300- μ l-Pipette (wird mitgeliefert) 300 μ l (eine Pipettenfüllung) der Probe in die Öffnung der Kartusche transferieren.



- 5 Den Kartuschendeckel schließen.

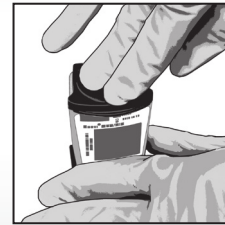

- 6 Den Test innerhalb des in der Packungsbeilage angegebenen Zeitrahmens beginnen.