



# Entnahme von Rektalabstrichen durch eine medizinische Fachkraft | Zur Verwendung mit dem Xpert® Abstrich-Entnahmekit – Bestellnr. SWAB/G-50


1 .....  
Vor dem Vorgang Hände waschen. Die Einzelentnahme-Verpackung **A** mit dem Xpert Tupfer-Transportröhrchen mit rosafarbenem Deckel und dem einzeln verpackten Entnahmetupfer öffnen. Das Röhrchen beiseite stellen, bevor die Probe entnommen wird. Den größeren Tupfer entsorgen **B**.

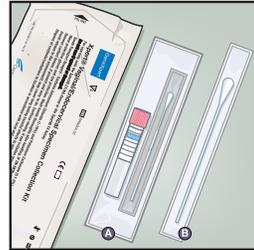


5 .....  
  
Den Tupfer weiter in derselben Hand halten und den Deckel vom Xpert Tupfer-Transportröhrchen abschrauben. Den Inhalt des Röhrchens nicht verschütten. Wenn der Inhalt des Röhrchens verschüttet wird, ein neues Entnahmekit benutzen. Den Entnahmetupfer sofort in das Transportröhrchen stecken. **WARNUNG:** Falls der Inhalt des Röhrchens auf die Haut gelangt, den betroffenen Bereich mit Wasser und Seife waschen. Falls der Inhalt des Röhrchens in die Augen gelangt, die Augen sofort mit Wasser spülen.

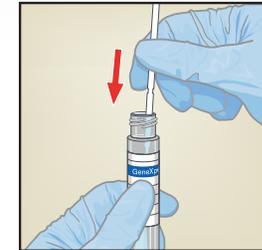


2 .....  
Die Verpackung des Entnahmetupfers öffnen, indem sie von oben her aufgezogen wird. Den Tupfer entnehmen. Dabei darauf achten, die Spitze weder anzufassen noch abzulegen. Falls die weiche Spitze berührt oder der Tupfer hingelegt wird oder herunterfällt, ein neues Entnahmekit verwenden.

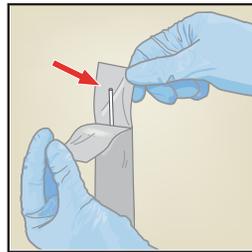


6 .....  
Die Sollbruchstelle des Entnahmetupfers ausfindig machen und den Stiel des Tupfers vorsichtig gegen die Röhrchenwand drücken, sodass er an der Sollbruchstelle abbricht. Den oberen Teil des Stiels entsorgen. Den Stiel des Tupfers zum Abbrechen bei Bedarf vorsichtig drehen. Verspritzen des Inhalts auf die Haut vermeiden. Bei Kontakt mit Wasser und Seife waschen.

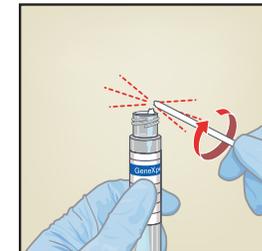


3 .....  
Den Tupfer so in der Hand halten, dass Daumen und Zeigefinger in der Mitte des Stiels über der Sollbruchstelle liegen.

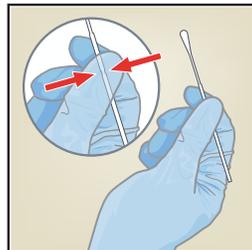

7 .....  
Den Deckel des Transportröhrchens wieder aufsetzen und fest zuschrauben.

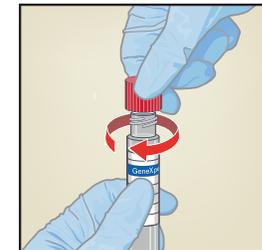

4 .....  
Den Tupfer vorsichtig etwa 1 cm über den Afterschließmuskel hinaus einführen (d. h. bis die Faserspitze nicht mehr zu sehen ist) und behutsam drehen.

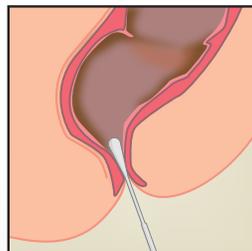


8 .....  
Das Röhrchen 3 bis 4 Mal umdrehen oder vorsichtig schütteln, damit sich Material aus dem Tupfer löst. Schaumbildung vermeiden. Das Transportröhrchen wie erforderlich mit den Angaben zur Probenidentifikation (einschließlich Entnahmedatum) beschriften.


Die Probe sollte bei 2–30 °C transportiert werden. Vor der Testung kann die Probe bis zu 60 Tage bei 2–30 °C aufbewahrt werden.

# Entnahme von Rachenabstrichen durch eine medizinische Fachkraft | Zur Verwendung mit dem Xpert® Abstrich-Entnahmekit – Bestellnr. SWAB/G-50


1 .....  
Vor dem Vorgang Hände waschen. Die Einzelentnahme-Verpackung **A** mit dem Xpert Tupfer-Transportröhrchen mit rosafarbenem Deckel und dem einzeln verpackten Entnahmetupfer öffnen. Das Röhrchen beiseite stellen, bevor die Probe entnommen wird. Den größeren Tupfer entsorgen **B**.

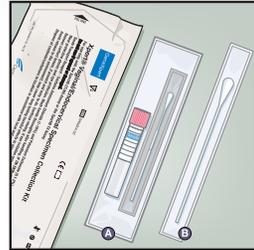


2 .....  
Die Verpackung des Entnahmetupfers öffnen, indem sie von oben her aufgezogen wird. Den Tupfer entnehmen. Dabei darauf achten, die Spitze weder anzufassen noch abzulegen. Falls die weiche Spitze berührt oder der Tupfer hingelegt wird oder herunterfällt, ein neues Entnahmekit verwenden.

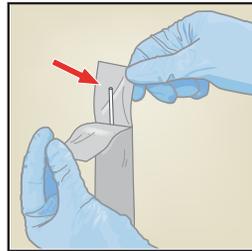


3 .....  
Den Tupfer so in der Hand halten, dass Daumen und Zeigefinger in der Mitte des Stiels über der Sollbruchstelle liegen.

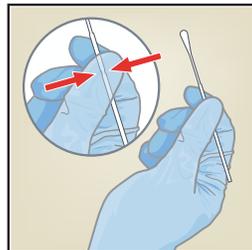


4 .....  
Den Patienten auffordern, den Mund weit zu öffnen. Die Zunge nach unten halten. Den Rachenbereich (Mandeln, Zäpfchen, Hinterwand) mit dem Tupfer abstreichen.

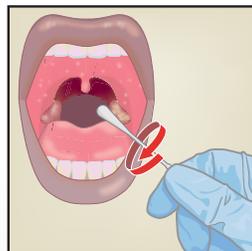


5 .....  
 Den Tupfer weiter in derselben Hand halten und den Deckel vom Xpert Tupfer-Transportröhrchen abschrauben. Den Inhalt des Röhrchens nicht verschütten. Wenn der Inhalt des Röhrchens verschüttet wird, ein neues Entnahmekit benutzen. Den Entnahmetupfer sofort in das Transportröhrchen stecken. **WARNUNG:** Falls der Inhalt des Röhrchens auf die Haut gelangt, den betroffenen Bereich mit Wasser und Seife waschen. Falls der Inhalt des Röhrchens in die Augen gelangt, die Augen sofort mit Wasser spülen.

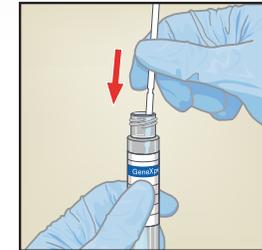

6 .....  
Die Sollbruchstelle des Entnahmetupfers ausfindig machen und den Stiel des Tupfers vorsichtig gegen die Röhrchenwand drücken, sodass er an der Sollbruchstelle abbricht. Den oberen Teil des Stiels entsorgen. Den Stiel des Tupfers zum Abbrechen bei Bedarf vorsichtig drehen. Verspritzen des Inhalts auf die Haut vermeiden. Bei Kontakt mit Wasser und Seife waschen.

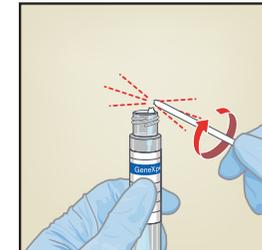

7 .....  
Den Deckel des Transportröhrchens wieder aufsetzen und fest zuschrauben.

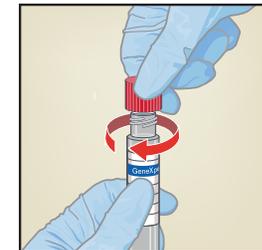

8 .....  
Das Röhrchen 3 bis 4 Mal umdrehen oder vorsichtig schütteln, damit sich Material aus dem Tupfer löst. Schaumbildung vermeiden. Das Transportröhrchen wie erforderlich mit den Angaben zur Probenidentifikation (einschließlich Entnahmedatum) beschriften. Die Probe sollte bei 2–30 °C transportiert werden. Vor der Testung kann die Probe bis zu 60 Tage bei 2–30 °C aufbewahrt werden.