

# Xpert Testwiederholung

- Xpert C. difficile BT
- Xpert MRSA/SA SSTI
- Xpert vanA/vanB

**Ausführliche Anleitung, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise sind der Packungsbeilage zu entnehmen.**

Ein Exemplar des Sicherheitsdatenblatts ist erhältlich unter [www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) oder [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com)

Technischer Kundendienst von Cepheid  
Büro USA  
+1 (888) 838-3222, Option 2  
[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)  
Europäische Niederlassung  
+33 563 825 319  
[support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)

Wiederholen Sie den Test wie hier angegeben innerhalb von 3 Stunden nach einem auf **FEHLER (ERROR)**, **UNGÜLTIG (INVALID)** oder **KEIN ERGEBNIS (NO RESULT)** lautenden Ergebnis.


Andernfalls:  
Wiederholen Sie den Test mit der Restprobe, sofern das Volumen ausreicht oder  
Entnehmen Sie eine neue Probe und bearbeiten Sie diese entsprechend der Packungsbeilage.



- 1 Die gebrauchte Kartusche zurückbehalten. Eine neue Xpert-Kartusche und ein neues Fläschchen mit Probenreagenz beschaffen.




- 2 Den gesamten Restinhalt aus der Probenkammer der gebrauchten Kartusche in ein neues Fläschchen mit Probenreagenz transferieren.

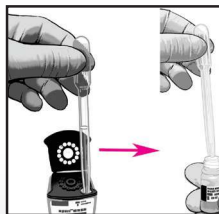

- 3 Das Fläschchen mit Probenreagenz wieder verschließen und 10 Sekunden lang vortexen.



- 4 Den Deckel der Xpert-Kartusche öffnen.

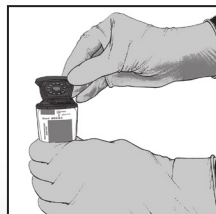

- 5 Den gesamten Inhalt des Fläschchens mit Probenreagenz mit einer Einweg-Transferpipette aspirieren.



- 6 Die Pipette in die Probenkammer entleeren.



- 7 Den Deckel der Xpert-Kartusche schließen und den Test innerhalb des in der Packungsbeilage angegebenen Zeitrahmens starten.

