

Préparation de la cartouche Xpert[®] Factor II & Factor V

Consulter la notice pour obtenir les instructions détaillées, les précautions et les avertissements.

Pour obtenir un exemplaire de la FDS, consulter le site www.cepheid.com ou www.cepheidinternational.com

Service d'assistance technique de Cepheid
Bureau aux États-Unis
(888) 838-3222, choix 2
techsupport@cepheid.com

Bureau en Europe
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com




1 Se procurer le tube de collecte d'échantillon recueilli sur EDTA ou citrate de sodium.



2 Se procurer une cartouche Xpert Factor II & Factor V.




3 Mélanger doucement l'échantillon jusqu'à ce qu'il soit homogène, en retournant le tube d'échantillon 5 fois.

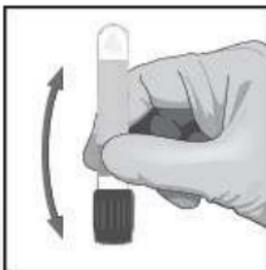

4 Ouvrir le couvercle de la cartouche Xpert.



5 En utilisant une pipette volumétrique munie d'un embout avec filtre résistant aux aérosols, aspirer 50 µl de l'échantillon.

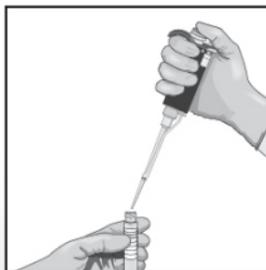

6 Déposer l'échantillon sur la paroi inférieure de la chambre « S » de la cartouche.



7 Fermer le couvercle de la cartouche Xpert.



8 Charger la cartouche et lancer le test.