

Preparazione della cartuccia Xpert®

- Xpert Xpress SARS-CoV-2
- Xpert Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV
- Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV *plus*
- Xpert Xpress CoV-2 *plus*

Per istruzioni dettagliate, precauzioni e avvertenze, fare riferimento al foglietto illustrativo.

Per una copia della scheda dati di sicurezza (SDS), visitare il sito www.cepheid.com o www.cepheidinternational.com

Le informazioni di contatto di tutti gli uffici di Supporto Tecnico di Cepheid sono disponibili nel sito: www.cepheid.com/en/CustomerSupport.




- 1** Usare una singola cartuccia Xpert per ogni campione.



- 2** Capovolgere rapidamente la provetta per 5 volte.




- 3** Aprire il coperchio della cartuccia.

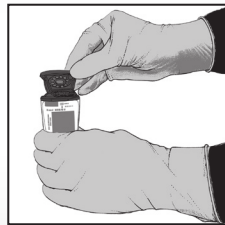

- 4** Utilizzando una pipetta pulita da 300 µl (fornita), trasferire 300 µl (un'aspirazione) di campione nell'apertura della cartuccia.



- 5** Chiudere il coperchio della cartuccia.

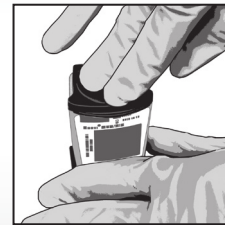

- 6** Dare inizio al test entro l'arco di tempo specificato nel foglietto illustrativo.