


Preparazione della cartuccia Xpert® HPV v2

Per istruzioni dettagliate, avvertenze e precauzioni, fare riferimento alle Istruzioni per l'uso.

1

Ottenere un campione di analisi adeguatamente prelevato ed etichettato.

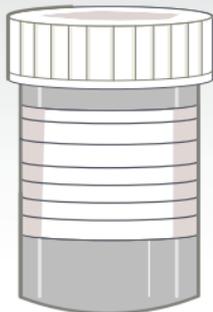

2

Procurarsi una cartuccia Xpert HPV v2 e una pipetta di trasferimento (fornita in dotazione). La tacca sulla pipetta indica un volume di riempimento pari a 1 ml. Applicare alla cartuccia un'etichetta con l'identificazione del campione.



3

Controllare che la cartuccia per il test non sia danneggiata. Se è danneggiata, non utilizzarla. Aprire il coperchio della cartuccia.



4

Miscelare il campione capovolgendo delicatamente il relativo flaconcino da 8 a 10 volte, oppure miscelandolo brevemente con un miscelatore vortex a velocità media per 5 secondi senza interruzione.



5

Aprire la confezione della pipetta di trasferimento. Aprire il coperchio del flaconcino del campione, schiacciare il bulbo della pipetta di trasferimento, inserire la pipetta nel flaconcino e riempirla, rilasciando il bulbo, fino alla tacca che indica 1 ml. Verificare che la pipetta si riempi senza che siano presenti bolle.



6

Espellere il contenuto della pipetta nella camera della cartuccia riservata al campione. Evitare di aggiungere muco in eccesso nella cartuccia.



7

Chiudere il coperchio della cartuccia e iniziare il test entro l'intervallo di tempo specificato nelle Istruzioni per l'uso.

