

Guide de démarrage rapide Xpert® HCV VL Fingerstick

Matériel nécessaire


- 1 Minivette POCT violette jetable de Sarstedt (EDTA 100 µL)
- 1 Lancette de sécurité 18 G, profondeur 1,8 mm, ou une lame de 1,5 mm, Sarstedt ou équivalente
- 1 Lingette imbibée d'alcool désinfectant
- 1 Tampon de gaze stérile




- 1
- Mettre des gants.
 - Sélectionner le bout du doigt pour le site de ponction sur la main non dominante (zones adaptées colorées en bleu).
 - Si nécessaire, favoriser le débit sanguin au niveau du site de ponction en chauffant la zone.




- 2
- Désinfecter le site de ponction et laisser sécher à l'air.
 - Tourner le capuchon protecteur de la lancette (1/4 de tour) et tirer pour le faire sortir.

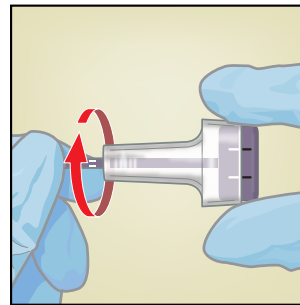


- 3
- Poser la main du patient sur une surface stable.
 - Piquer le bout du doigt.
 - Éliminer la lancette de sécurité dans un conteneur à déchets adapté.

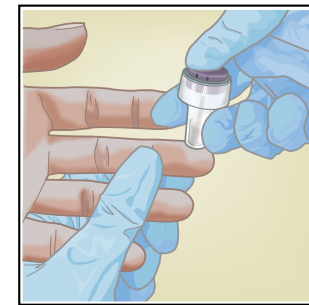


- 4
- Essuyer la première goutte de sang à l'aide d'un tampon de gaze stérile.

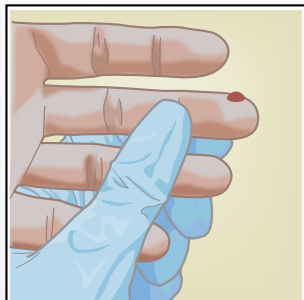

- 5
- Recueillir le sang en utilisant la Minivette POCT.
 - **NE PAS :**
 - Recouvrir l'orifice de ventilation.
 - Tenir la Minivette POCT en position verticale.

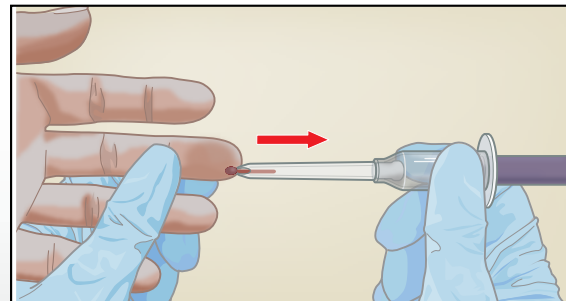

- 6
- Le prélèvement sanguin est terminé lorsque le sang atteint le filtre blanc.

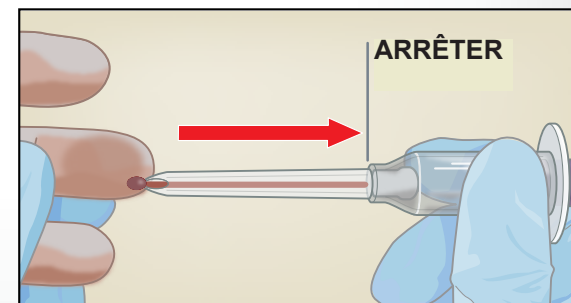


Guide de démarrage rapide Xpert® HCV VL Fingerstick



1 Prendre une cartouche pour chaque échantillon.



2 Ouvrir le couvercle de la cartouche.

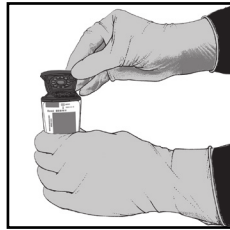

3 Placer l'extrémité capillaire entièrement dans la chambre à échantillon de la cartouche et appuyer doucement sur le piston pour distribuer l'échantillon de sang total. Jeter la Minivette POCT.

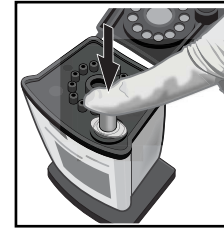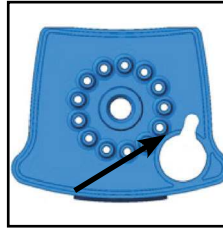

4 Bien fermer le couvercle.



5 Cliquer sur Créer un test (Create Test).



6 Lire le code-barres de la cartouche.



7 Saisir ou lire le N° Id de l'échantillon (Sample ID).

Sample ID	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>
Select Assay	<None>
Select Module	<input type="text"/>
Reagent Lot ID	<input type="text"/>
Expiration Date	<input type="text"/>

8 Cliquer sur Démarrer le test (Start Test).




9 Charger la cartouche dans le module identifié par le voyant vert clignotant. Fermer la porte du module jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et que le voyant vert cesse de clignoter.



Résultats générés <60 minutes

10 Cliquer sur l'icône Afficher les résultats (View Results). Cliquer sur Afficher le test (View Test) en bas de l'écran. Sélectionner le N° Id de l'échantillon (Sample ID) correct.

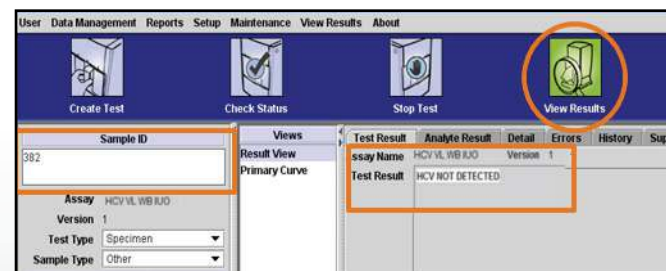

11 Éliminer la cartouche usagée.

