

Preparação do cartucho Xpert[®] HIV-1 VL XC *utilizando uma pipeta fornecida pela Cepheid*

- Xpert[®] HIV-1 VL XC

Consulte as instruções detalhadas, as precauções e as indicações de atenção no folheto informativo.

Poderá obter um exemplar da FDS em www.cepheid.com ou www.cepheidinternational.com
Assistência técnica da Cepheid
Delegação nos EUA
(888) 838-3222, Opção 2
techsupport@cepheid.com

Delegação na Europa
+33 563 825 319
support@cepheideurope.com




NOTA: Deixe os cartuchos do teste HIV-1 VL XC e a amostra equilibrarem a 15 °C–30 °C antes de pipetar o plasma para o cartucho. Não pipete plasma para um cartucho que está frio (abaixo de 15 °C).


- 1** Tome um cartucho Xpert por cada tubo de plasma.



- 2** Abrir a tampa do cartucho.

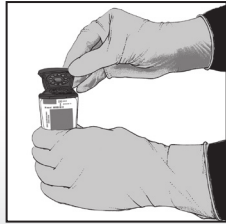

- 3** Encha a pipeta até imediatamente abaixo do bolbo para transferir, pelo menos, 1 ml de plasma do tubo. Certifique-se de que não se criam bolhas de ar grandes na pipeta enquanto enche a pipeta.

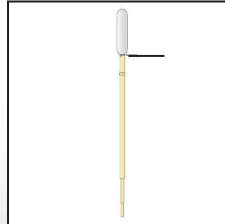

- 4** Esvazie o conteúdo da pipeta para dentro da câmara de amostra do cartucho.



- 5** Feche a tampa do cartucho.



- 6** Inicie o teste dentro do prazo indicado no folheto informativo.

Preparação do cartucho Xpert® HIV-1 VL XC *utilizando uma pipeta de precisão*

Consulte o folheto informativo para obter instruções detalhadas, precauções e advertências.

Poderá obter um exemplar da FDS em www.cepheid.com ou www.cepheidinternational.com
Assistência técnica da Cepheid
Delegação nos EUA
(888) 838-3222, Opção 2
techsupport@cepheid.com

Delegação na Europa
+33 563 825 319
support@cepheideurope.com




NOTA: Deixe os cartuchos do teste HIV-1 VL XC e a amostra equilibrarem a 15 °C–30 °C antes de pipetar o plasma para o cartucho.
Não pipete plasma para um cartucho que está frio (abaixo de 15 °C).


1 Tome um cartucho Xpert por cada tubo de plasma.



2 Abrir a tampa do cartucho.

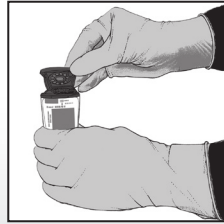

3 Pré-humedeça a ponta de pipeta uma vez, enchendo a ponta da pipeta com plasma e esvaziando-a para o tubo. De seguida, encha a pipeta com 1 ml de plasma do tubo.

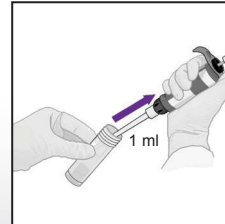

4 Esvazie o conteúdo da pipeta para dentro da câmara de amostra do cartucho.



5 Feche a tampa do cartucho.



6 Inicie o teste dentro do prazo indicado no folheto informativo.