

Vorbereitung der Xpert® Xpress GBS-Kartusche

Ausführliche Anleitung, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise sind der Packungsbeilage zu entnehmen.

Ein Exemplar des Sicherheitsdatenblatts ist erhältlich unter www.cepheid.com oder www.cepheidinternational.com

Technischer Kundendienst von Cepheid
US-Niederlassung
(888) 838-3222
techsupport@cepheid.com

Europäische Niederlassung
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com




1 Eine Kartusche beschaffen.



2 Den Kartuschendeckel öffnen.



3 Einen Tupfer vom Deckel entfernen und die beiden Tupfer vorsichtig fünf Sekunden lang mit einer Drehbewegung gegeneinander reiben. Den zweiten immer noch am Deckel befestigten Tupfer zurück in das Transportröhrchen geben.

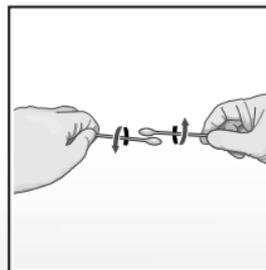

Hinweis: Den Tupfer nicht unterhalb der Sollbruchstelle halten.

4 Den Tupfer in die Probenkammer der Kartusche einführen. Den Tupfer an der Sollbruchstelle abbrechen.



Hinweis: Zur Minimierung des Kontaminationsrisikos Gaze oder Ähnliches verwenden.

5 Darauf achten, dass sich der Tupfer in der Kammer frei bewegen kann.



Falsche Platzierung des Tupfers. Das Ende des Tupfers steckt in der Aussparung der Probenöffnung fest.



6 Den Kartuschendeckel schließen. Den Test innerhalb des in der Packungsbeilage angegebenen Zeitrahmens beginnen.



Xpert Testwiederholung

• Xpert® Xpress GBS

Ausführliche Anleitung, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise sind der Packungsbeilage zu entnehmen.

Ein Exemplar des Sicherheitsdatenblatts ist erhältlich unter www.cepheid.com oder www.cepheidinternational.com

Technischer Kundendienst von Cepheid
US-Niederlassung
(888) 838-3222, Option 2
techsupport@cepheid.com

Europäische Niederlassung
+33 563 82 53 19
support@cepheid.com



1 Die gebrauchte Kartusche entsorgen. Eine neue Xpert® Xpress GBS-Kartusche beschaffen. Den verbleibenden Tupfer aus dem Entnahmetransportröhrchen entfernen.



2 Den Tupfer in die Probenkammer der neuen Kartusche einführen. Den Tupfer anheben, sodass die Sollbruchstelle in der Aussparung zentriert ist. Den Tupfer durch scharfes Biegen nach rechts abbrechen.



3 Sicherstellen, dass der Tupfer in der Kartusche richtig positioniert ist und das Ende des Tupfers nicht in der Aussparung der Probenkammeröffnung steckt und nicht das Schließen des Deckels verhindert.



4 Wenn der Tupfer in der Aussparung feststeckt, ein fusselfreies Wischtuch/eine fusselfreie Gaze oder das verbleibende Ende des Tupfers verwenden, um ihn aus der Aussparung zu lösen und so das Kontaminationsrisiko zu minimieren.



5 Den Kartuschendeckel schließen. Den Test innerhalb des in der Packungsbeilage angegebenen Zeitrahmens beginnen.

