



Recogida de la muestra de orina (primera orina) para los ensayos Xpert CT/NG y Xpert TV


1 Indique al paciente que suministre la primera orina (de 20 a 50 ml) en un recipiente de recogida de orina que no contenga conservantes.
Nota: Antes de recoger la muestra de orina, el paciente no debe haber orinado durante al menos 1 hora, ni debe haberse limpiado la zona genital (mujeres) o la punta del pene (varones).

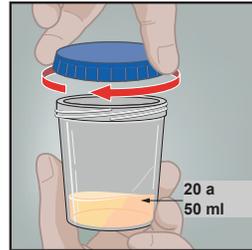


2 El kit de recogida de muestras de orina Xpert® contiene
A Pipeta de transferencia desechable grande
B Tubo de reactivo de transporte de orina (tapa amarilla)

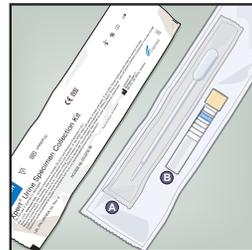


3 Abra el paquete de la pipeta de transferencia desechable que se incluye en el kit.

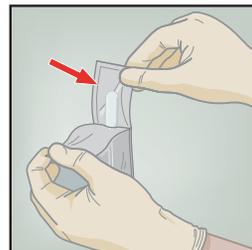


4 Retire la tapa amarilla del tubo de transporte.

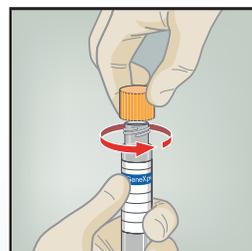


5 Mezcle bien la muestra. Transfiera unos 7 ml de orina al tubo de transporte, utilizando la pipeta de transferencia desechable. Observe la línea de puntos negra en la etiqueta del tubo de transporte y llene hasta la línea para conseguir el volumen de llenado correcto.

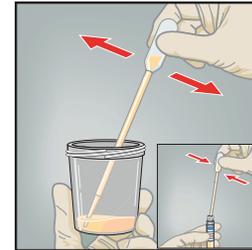

6 Vuelva a colocar la tapa amarilla en el tubo de transporte y ajústela bien.

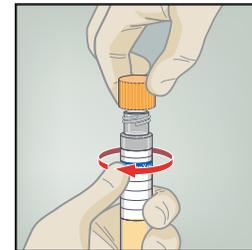

7 Invierta el tubo de transporte 3 o 4 veces para garantizar que la muestra y el reactivo se mezclen bien.

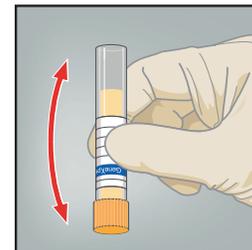

8 Etiquete el tubo de transporte con la información de identificación de la muestra, incluida la fecha de recogida, según sea necesario. No tape la línea punteada negra de llenado en el tubo de reactivo de transporte de orina Xpert.

