


Entnahme von Rachenabstrichen

Xpert Xpress Strep A


1

Das ESwab Entnahme- und Transportsystem Copan (480C, 480CE oder 480CFA) verwenden.

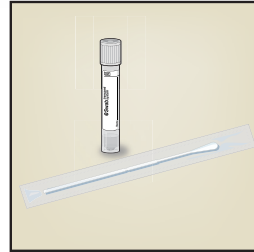


2

Den Tupfer entnehmen. Dabei darauf achten, weder die Spitze des Tupfers anzufassen noch diesen abzulegen.

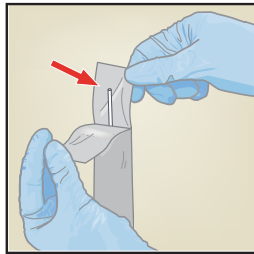


3

Den Tupfer so in der Hand halten, dass Daumen und Zeigefinger in der Mitte des Stiels über der Sollbruchstelle liegen.

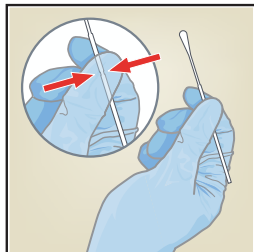


4

Mit dem Tupfer wie dargestellt vorsichtig über Rachen, Mandeln und andere entzündete Bereiche streichen. Bei der Probenentnahme einen Kontakt des Tupfers mit Zunge, Wangen und Zähnen vermeiden.

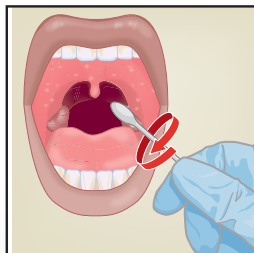


5

Den Deckel vom Röhrchen abnehmen. Den Deckel nicht mit der offenen Seite nach unten ablegen oder das Innere des Deckels berühren. Den Tupfer in das Röhrchen mit Transportmedium stecken.

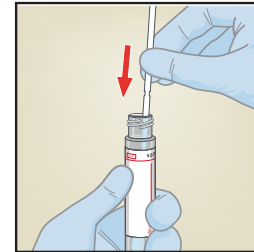


6

Den Tupfer an der Sollbruchstelle brechen, indem er gegen die Wand des Röhrchens gebogen wird.

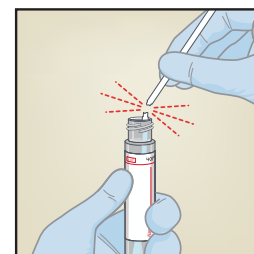

7

Den Deckel wieder auf das Röhrchen setzen und fest zuschrauben.

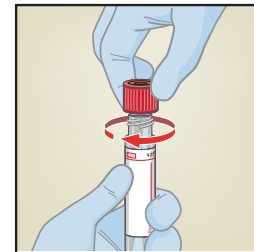

8

Transport- und Lagertemperatur für Proben (°C)
bei 15–30 °C bis zu 48 Stunden
bei 2–8 °C bis zu 6 Tage