

# Xpert® Préparation de la cartouche HPV

Consulter la notice pour obtenir les instructions détaillées, les précautions et les avertissements.

Pour obtenir une copie de la FDS, consulter le site [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com)

Service d'assistance technique de Cepheid

Bureau aux États-Unis  
(888) 838-3222

[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)


Bureau en Europe

+33 563 82 53 19


[support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)



1 Se procurer un échantillon cervical prélevé et étiqueté de manière appropriée.

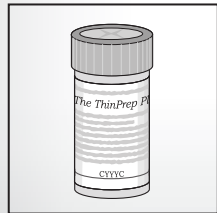


2 Se procurer une cartouche Xpert HPV et une pipette de transfert (fournie).

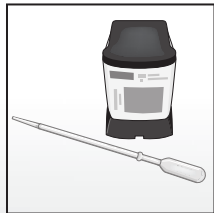


3 Ouvrir le couvercle de la cartouche Xpert.



4 Inverser doucement le flacon d'échantillon 8 à 10 fois ou vortexez-le brièvement dans un mélangeur à vortex à vitesse intermédiaire pendant 5 secondes.

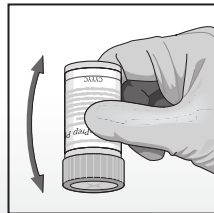


5 Remplir la pipette de transfert avec l'échantillon jusqu'au trait (1 ml).

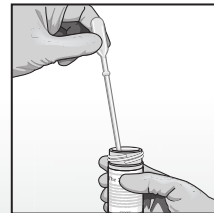

6 Vider le contenu de la pipette dans la chambre de l'échantillon.



7 Fermer le couvercle de la cartouche Xpert.

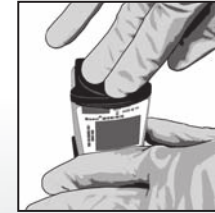

8 Insérer la cartouche et lancer le test.

