

Vorbereitung der Xpert[®]-Kartusche *Abbildungen zeigen Urin- oder Abstrichprobe im Transportröhrchen.*

- Xpert CT/NG
- Xpert TV

Ausführliche Anleitung, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise sind der Packungsbeilage zu entnehmen.

Ein Exemplar des Sicherheitsdatenblatt ist auf www.cepheid.com oder www.cepheidinternational.com abrufbar


Technischer Kundendienst von Cepheid

Büro USA
(888) 838-3222, Option 2
techsupport@cepheid.com

Büro Europa
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com




- 1 Ein korrekt entnommenes und beschriftetes Transportröhrchen beschaffen.

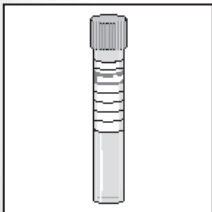


- 2 Eine Xpert Kartusche und Transferpipette (im Assaykit enthalten) beschaffen.




- 3 Den Xpert Kartuschendeckel öffnen.

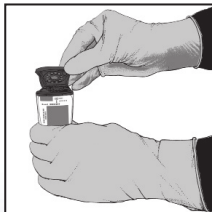

- 4 Das Transportröhrchen zum Mischen 3 bis 4 Mal vorsichtig umdrehen.

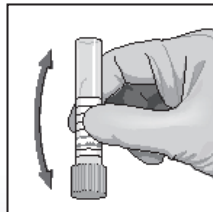


- 5 Die Transferpipette bis über die Markierung auf dem Pipettenschaft füllen.

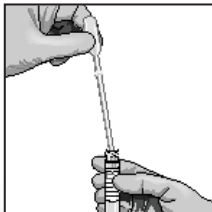


- 6 Die Transferpipette in die Probenkammer entleeren.



- 7 Den Xpert Kartuschendeckel schließen.

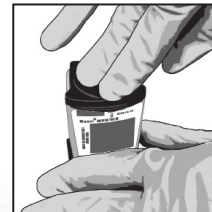

- 8 Die Kartusche einsetzen und die Test starten.

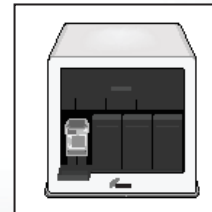

Vorbereitung der Xpert®-Kartusche

Abbildungen zeigen Urinprobe im primären Sammelgefäß.

- Xpert CT/NG
- Xpert TV

Ausführliche Anleitung, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise sind der Packungsbeilage zu entnehmen.

Ein Exemplar des Sicherheitsdatenblatt ist auf www.cepheid.com oder www.cepheidinternational.com abrufbar


Technischer Kundendienst von Cepheid

Büro USA
(888) 838-3222, Option 2
techsupport@cepheid.com


Büro Europa
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com




- 1 Eine Erststrahlurinprobe im primären Sammelgefäß beschaffen. Sicherstellen, dass der Urin im Uringefäß gut durchmischt ist, bevor ein Aliquot in das Xpert Urin-Transportröhrchen transferiert wird.

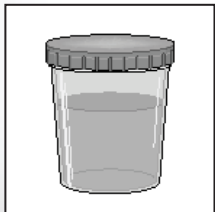

- 2 Ein Xpert Urin-Probenentnahmekit beschaffen.

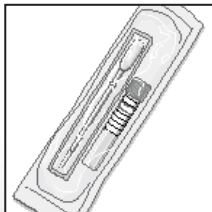

- 3 Die Packung einer Einweg-Transferpipette öffnen, die dem Xpert Urin-Probenentnahmekit beiliegt. *HINWEIS: NICHT die Pipette aus dem Assaykit verwenden.*

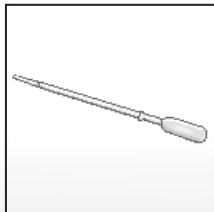


- 4 Die Transferpipette bis zum Boden des Uringefäßes einführen.



- 5 Ungefähr 7 ml Urin transferieren, sodass das Volumen die schwarze gestrichelte Linie auf dem Etikett des Röhrchens erreicht.



- 6 Den Deckel wieder auf das Urin-Transportröhrchen setzen und fest zuschrauben. Entsprechend beschriften und zum Bereich, in dem die GeneXpert Assaykartusche vorbereitet wird, bringen.

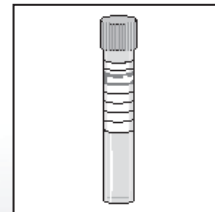

- 7 Bitte die weiteren Anweisungen auf der Rückseite dieser Karte beachten.