

Preparazione della cartuccia del saggio Xpert[®] HCV VL

- Xpert[®] HCV Viral Load

Per istruzioni dettagliate, avvertenze e precauzioni, fare riferimento al foglietto illustrativo.

Per una copia della scheda dati di sicurezza (Safety Data Sheet, SDS), visitare il sito www.cepheid.com o www.cepheidinternational.com

Assistenza Tecnica di Cepheid

USA
888 838 3222, opzione 2
techsupport@cepheid.com

Europa
+33 563 825 319
support@cepheideurope.com

Prima di iniziare il test:

1. Centrifugare il campione per separare il plasma/siero dai globuli rossi in base alle istruzioni del produttore.
2. Lasciare che il plasma/siero si stabilizzi a temperatura ambiente (20 °C - 35 °C).
3. Miscelare su vortex per 15 secondi prima dell'uso. Se il campione di analisi è torbido, chiarificarlo con una rapida centrifugazione.




- 1 Usare una singola cartuccia Xpert per ogni campione.



- 2 Aprire il coperchio della cartuccia.




- 3 Aspirare il plasma/siero oltrepassando appena il contrassegno corrispondente a 1 mL sulla pipetta.

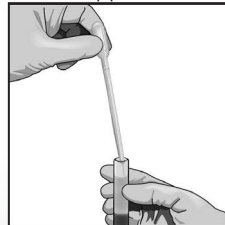

- 4 Vuotare il contenuto nella camera per il campione.



- 5 Chiudere il coperchio della cartuccia.

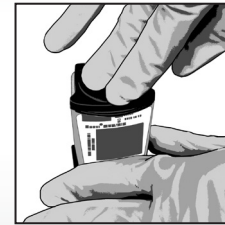

- 6 Dare inizio al test entro l'arco di tempo specificato nel foglietto illustrativo.