

Preparazione della cartuccia Xpert® HBV VL

- Xpert® HBV Viral Load

Per istruzioni dettagliate, avvertenze e precauzioni, fare riferimento al foglietto illustrativo.

Per una copia della SDS, consultare il sito:
www.cepheid.com o
www.cepheidinternational.com

Assistenza Tecnica di Cepheid
Stati Uniti
(888) 838 3222, opzione 2
techsupport@cepheid.com

Ufficio europeo
+33 563 825 319
support@cepheideurope.com

Prima di iniziare il test:


1. Centrifugare il campione per separare il plasma/siero dai globuli rossi in base alle istruzioni del produttore.
2. Lasciare che il plasma/siero si stabilizzi a temperatura ambiente (20-35 °C).
3. Miscelare con il vortex per 10 secondi prima dell'uso. Se il campione di analisi è torbido, chiarificare mediante una rapida centrifugazione.




- 1 Usare una singola cartuccia Xpert per ogni campione.



- 2 Aprire il coperchio della cartuccia.

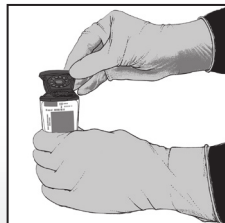

- 3 Aspirare il plasma/siero fino ad appena sopra la tacca da 1 mL sulla pipetta di trasferimento OPPURE aspirare esattamente 0,6 mL di plasma/siero utilizzando la pipetta di precisione.

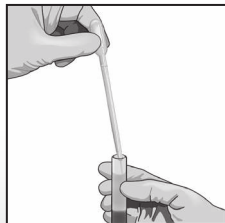

- 4 Vuotare il contenuto nella camera per il campione.



- 5 Chiudere il coperchio della cartuccia.



- 6 Iniziare il test entro 4 ore dall'introduzione del campione nella cartuccia.