

Guia de Início Rápido Xpert® HCV VL Fingerstick

Materiais necessários


- 1 Minivette POCT Sarstedt roxo descartável (EDTA 100 µl)
- 1 lanceta de segurança 18 G com lâmina de 1,8 mm ou 1,5 mm de profundidade, Sarstedt ou equivalente
- 1 toalhete desinfetante com álcool
- 1 gaze estéril




- 1
- Calçar luvas.
 - Selecionar o local de punção na ponta dos dedos da mão não dominante (zonas apropriadas assinaladas a azul).
 - Se necessário, aquecer a zona do local de punção para estimular o fluxo sanguíneo.




- 2
- Desinfetar o local da punção e deixar secar ao ar.
 - Torcer a tampa de proteção da lanceta (1/4 volta) e puxá-la.

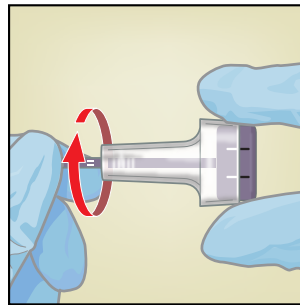


- 3
- Colocar a mão do paciente numa superfície estável.
 - Puncionar a ponta do dedo.
 - Eliminar a lanceta de segurança num recipiente de resíduos apropriado.

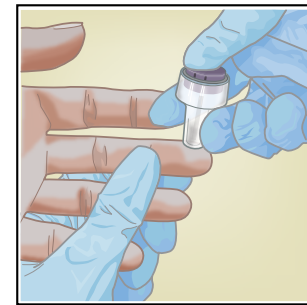


- 4
- Limpar a primeira gota de sangue utilizando a gaze estéril.

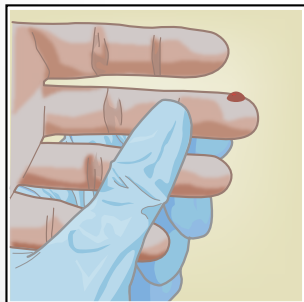

- 5
- Colher o sangue utilizando o Minivette POCT.
 - **NÃO:**
 - Tapar o orifício de ventilação.
 - Segurar a Minivette POCT na posição vertical.

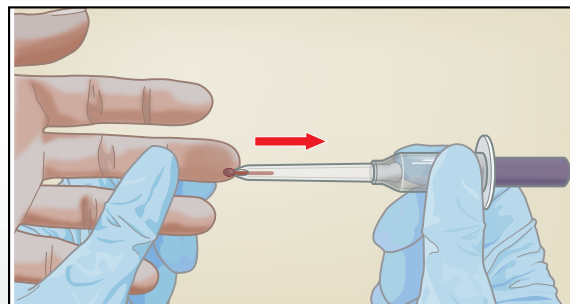

- 6
- A colheita de sangue termina quando o sangue atingir o filtro de cor branca.

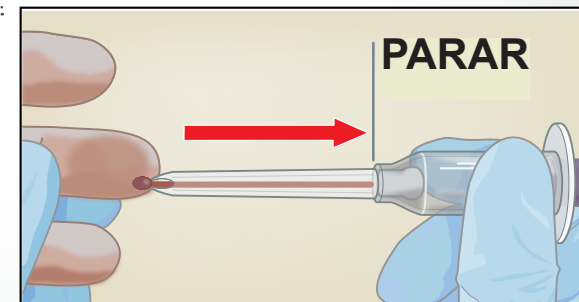


Guia de Início Rápido Xpert® HCV VL Fingerstick



1 Utilizar um cartucho para cada amostra.



2 Abrir a tampa do cartucho.

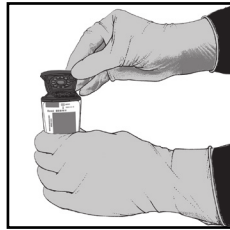

3 Colocar a ponta capilar completamente na câmara da amostra do cartucho e pressionar ligeiramente o pistão para distribuir a totalidade da amostra sanguínea. Eliminar o Minivette POCT.

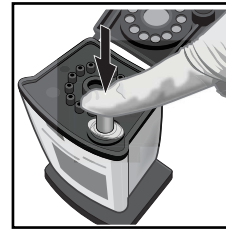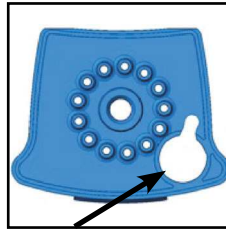

4 Fechar a tampa com firmeza.



5 Clicar em Criar teste (Create Test).



6 Ler o código de barras do cartucho.



7 Introduzir ou digitalizar a ID da amostra (Sample ID).

Sample ID	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>
Select Assay	<None>
Select Module	<input type="text"/>
Reagent Lot ID	<input type="text"/>
Expiration Date	<input type="text"/>

8 Clicar em Iniciar teste (Start Test).




9 Colocar o cartucho no módulo identificado com a luz verde intermitente. Fechar a porta do módulo até ficar trancada e a luz verde parar de piscar.



Resultados gerados em <60 minutos

10 Clicar no ícone Ver resultados (View Results). Clicar em Ver teste (View Test) na parte inferior do ecrã. Selecionar a ID da amostra (Sample ID) correta.

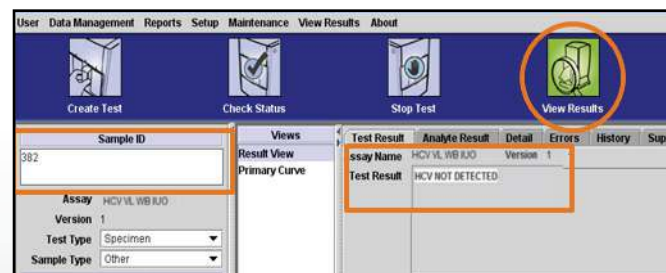

11 Eliminar o cartucho utilizado.

