



Raccolta di campioni da tampone nasale


1
Aprire la confezione contenente il tampone e la provetta del mezzo di trasporto. Mettere da parte la provetta prima del prelievo del campione di analisi.

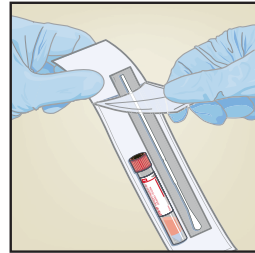

2
Aprire la confezione ed estrarre il tampone facendo attenzione a non permettere che la sua punta tocchi qualsiasi superficie.

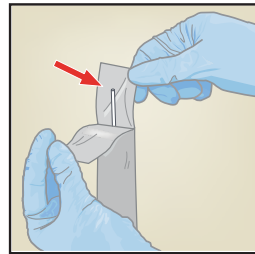

3
Afferrare il tampone tenendo saldamente tra le dita la parte centrale dello stelo sulla linea perforata.

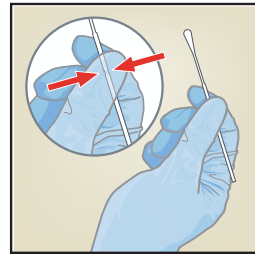


4
Far ruotare il tampone contro la superficie interna della narice per 3 secondi, premendo un dito sulla superficie esterna della narice.




Non inserire i tamponi per più di 1-1,5 cm.

5
Ripetere il punto 4 nell'altra narice utilizzando lo stesso tampone.

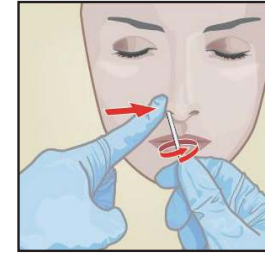


Per evitare la contaminazione del campione di analisi, dopo il prelievo evitare qualsiasi contatto con la punta del tampone.

6
Rimuovere il tappo dalla provetta. Inserire il tampone nel mezzo di trasporto.

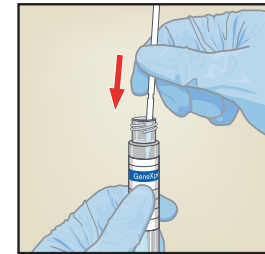

7
Spezzare lo stelo del tampone, in corrispondenza della linea perforata, contro il lato della provetta. Evitare di schizzare il contenuto sulla pelle. Se il contenuto dovesse venire a contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone.

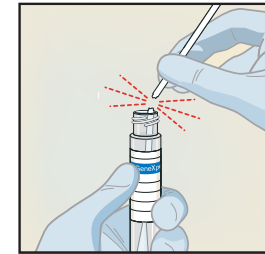

8
Rimettere il tappo sulla provetta e chiudere bene.

