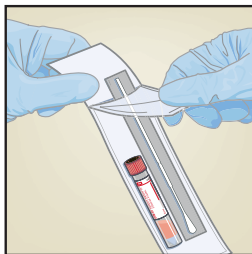
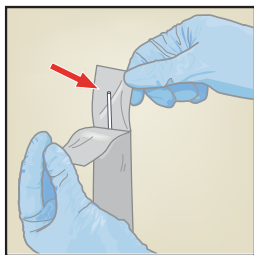


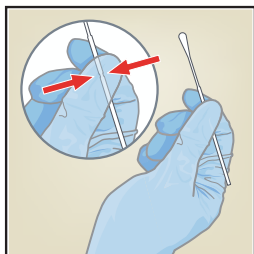
# Pobieranie próbek z jamy nosowo-gardłowej

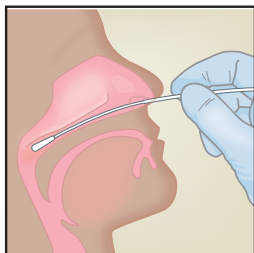
Do stosowania z zestawem Xpert® do pobierania próbek z jamy nosowo-gardłowej — nr kat. SWAB/B-100

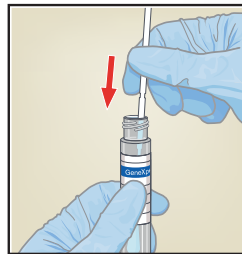
- 1 Otwórz opakowanie z wymazówką i probówką z podłożem transportowym. Przed pobraniem próbki odłóż probówkę na bok.

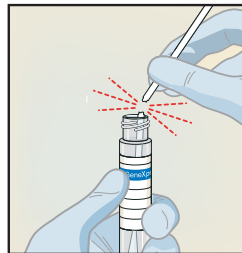

- 2 Otwórz opakowanie wymazówki i wyjmij ją, uważając aby nie dotknąć jej końcówką żadnej powierzchni.


- 3 Trzymaj wymazówkę dłonią, ściskając środek jej trzonu, w miejscu oznaczonym linią.


- 4 Delikatnie wprowadź wymazówkę do nozdrza aż do dotknięcia tylnej ściany jamy nosowo-gardłowej.  
Kilka razy obróć wymazówkę.


- 5 Zdejmij nakrętkę z probówki. Włóż wymazówkę w podłoże transportowe.


- 6 Złam trzon wymazówki, dociskając go do bocznej ścianki probówki, na poziomie oznaczonym linią.  
Należy uważać, aby nie doszło do rozprysnięcia zawartości na skórę. Jeżeli dojdzie do kontaktu ze skórą, umyć takie miejsce mydłem i wodą.


- 7 Nałóż zakrętkę na probówkę i szczelnie zakręć.

