

# Preparação do cartucho Xpert®

- Xpert Xpress SARS-CoV-2
- Xpert Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV
- Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV *plus*
- Xpert Xpress CoV-2 *plus*

**Consulte as instruções detalhadas, as precauções e as indicações de atenção no folheto informativo.**

Poderá obter um exemplar da FDS em [www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) ou [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com).

As informações de contacto de todos os escritórios da assistência técnica da Cepheid estão disponíveis no nosso website: [www.cepheid.com/en/CustomerSupport](http://www.cepheid.com/en/CustomerSupport).




1 Utilizar um cartucho Xpert para cada amostra.



2 Inverter rapidamente o tubo 5 vezes.




3 Abrir a tampa do cartucho.

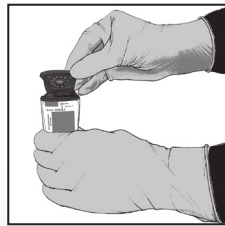

4 Utilizando uma pipeta de 300 µl limpa (fornecida), transferir 300 µl (uma colheita) da amostra para a abertura do cartucho.



5 Fechar a tampa do cartucho.

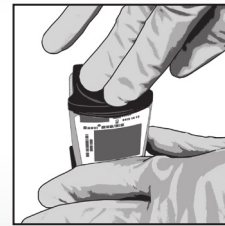

6 Iniciar o teste dentro do prazo especificado no folheto informativo.