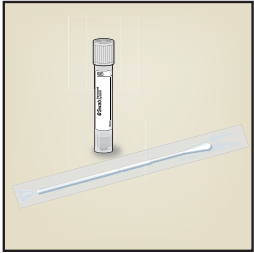
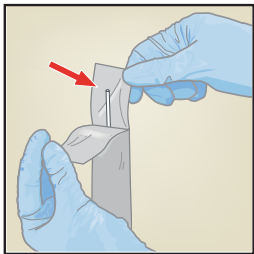


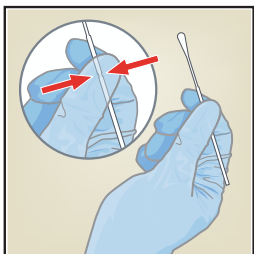
Recogida de muestras de hisopo de exudado faríngeo

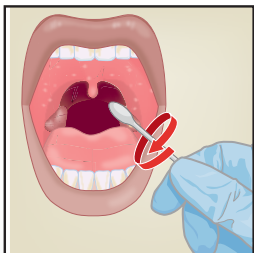
Xpert Xpress Strep A

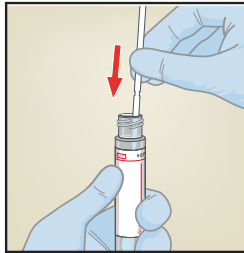
- 1 Utilice el sistema de recogida y transporte de ESwab (Copan 480C, 480CE o 480CFA).

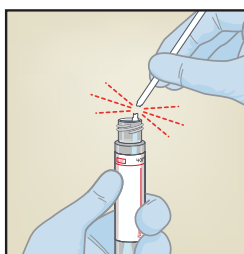

- 2 Retire el hisopo con cuidado de no tocar su punta ni apoyarlo en ningún lado.

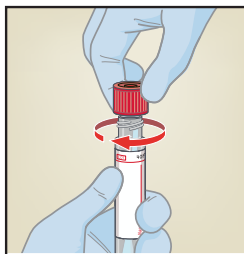

- 3 Sostenga el hisopo con la mano, colocando el pulgar y el dedo índice en la mitad del mango del hisopo encima de la línea ranurada.


- 4 Pase el hisopo por la faringe posterior, las amígdalas y otras zonas inflamadas, tal como se muestra. Evite tocar la lengua, las mejillas y los dientes con el hisopo al recoger las muestras.


- 5 Quite la tapa del tubo. No coloque el lado abierto del tapón hacia abajo ni toque el interior del tapón. Introduzca el hisopo en el tubo con el medio de transporte.


- 6 Rompa el mango del hisopo por la línea preranurada, doblándolo contra la pared del tubo.


- 7 Vuelva a poner la tapa en el tubo y ciérrelo bien.


- 8 Temperatura de transporte y conservación de las muestras (°C)
15-30 °C hasta 48 horas
2-8 °C hasta 6 días