

# Preparação do cartucho Xpert® HBV VL

- Xpert® HBV Viral Load

**Consulte as instruções detalhadas, precauções e advertências no folheto informativo.**

Para obter uma cópia da FDS, visite [www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) ou [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com)

Assistência Técnica da Cepheid  
Delegação nos EUA  
(888) 838-3222, Opção 2  
[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)

Delegação na Europa  
+33 563 825 319  
[support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)

## Antes de iniciar este teste:


1. Centrifugar a amostra para separar o plasma/soro e os glóbulos vermelhos de acordo com as instruções do fabricante.
2. Equilibrar o plasma/soro à temperatura ambiente (entre 20 °C e 35 °C).
3. Antes de utilizar, colocar o plasma/soro no vórtice durante 10 segundos. Se a amostra estiver turva, clarificar rodando uma vez rapidamente.




- 1** Utilizar um cartucho Xpert para cada amostra.



- 2** Abrir a tampa do cartucho.

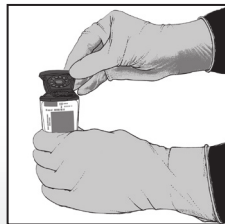

- 3** Aspirar o plasma/soro até imediatamente acima da marca de 1 ml na pipeta de transferência. Ou Aspirar apenas 0,6 ml de plasma/soro utilizando uma pipeta de precisão.

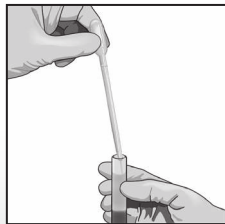

- 4** Esvaziar o conteúdo para a câmara da amostra.



- 5** Fechar a tampa do cartucho.



- 6** Iniciar o teste no prazo de 4 horas após a adição da amostra ao cartucho.