

Klargjøring av Xpert[®] HIV-1 Qual XC-patron med fullblod

Se pakningsvedlegget for detaljerte instruksjoner, forholdsregler og advarsler.

Besøk www.cepheid.com eller www.cepheidinternational.com for et eksemplar av sikkerhetsdatabladet.

Cepheid teknisk kundestøtte

Kontor i USA
(888) 838-3222, alternativ 2
techsupport@cepheid.com

Kontor i Europa
+33 563 825 319
support@cepheideurope.com

La patronen og prøven nå romtemperatur (15–30 °C) før du starter prosedyren.




- 1 Bland EDTA-fullblodet ved å vende røret opp ned minst 7 ganger.



- 2 Merk siden av patronen med pasient-ID-en.



- 3 Åpne lokket på patronen.

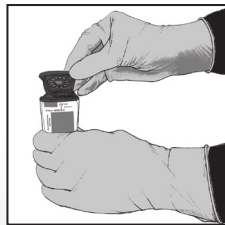


- 4 Fyll pipetten med 100 µl EDTA-fullblod ved å klemme ballongen. Sørg for at det ikke er noen bobler.




- 5 Overfør straks EDTA-fullblodet til prøvekompartimentet.



- 6 Lukk lokket på patronen.

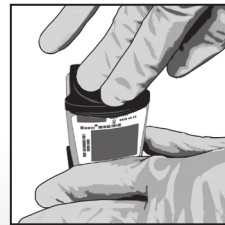

- 7 Start testen innen 4 timer.

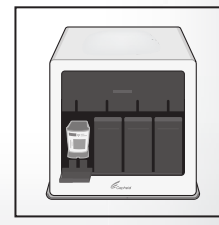

Klargjøring av Xpert[®] HIV-1 Qual XC-patron med tørkede bloddråper

Se pakningsvedlegget for detaljerte instruksjoner, forholdsregler og advarsler.

Besøk www.cepheid.com eller www.cepheidinternational.com for et eksemplar av sikkerhetsdatabladet.

Cepheid teknisk kundestøtte
Kontor i USA
(888) 838-3222, alternativ 2
techsupport@cepheid.com


Kontor i Europa
+33 563 825 319
support@cepheideurope.com

Før du starter prosedyren:


- La patronen og prøven nå romtemperatur (15–30 °C).
- Sørg for at kortet lufttørkes ved romtemperatur (15–30 °C) i minst 4 timer.
- Rengjør saksen/pinsetten med 10 % blekemiddel og la den tørke mellom hver prøve.



1 Merk siden av patronen med prøve-ID-en.

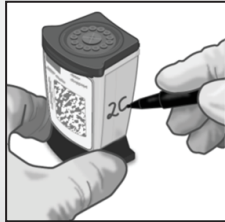


2 Åpne lokket på patronen.

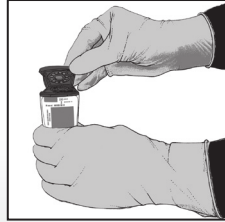


3 Bruk sterilisert saks til å klippe ut én DBS fra filterpapirkortet etter den stiplede linjen. Hvis den stiplede linjen er perforert, bruker du pinsett til å ta ut DBS.



4 Bruk pinsett til å føre DBS inn i prøvekompartimentet.

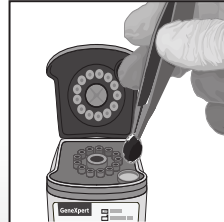

5 Skyv DBS ned med pinsetten til den når bunnen av kompartimentet.

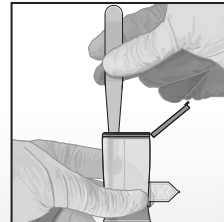

6 Lukk lokket på patronen.



7 Start testen innen 4 timer etter at prøven er tilsatt.

