

# Preparação do Cartucho Xpert<sup>®</sup> HCV VL

- Xpert<sup>®</sup> HCV Viral Load

Consultar o folheto informativo para obter instruções detalhadas, precauções e advertências.

Poderá obter um exemplar da FDS em [www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) ou [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com)

Assistência Técnica da Cepheid

Filial nos EUA  
(888) 838-3222, opção 2  
[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)

Filial na Europa  
+33 563 825 319  
[support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)

## Antes de iniciar este teste:


1. Centrifugar a amostra para separar o plasma/soro e os glóbulos vermelhos de acordo com as instruções do fabricante.
2. Equilibrar o plasma/soro à temperatura ambiente (20-35 °C).
3. Antes de utilizar, colocar no vórtice durante 15 segundos. Se a amostra estiver turva, clarificar rodando uma vez rapidamente.




- 1 Utilizar um cartucho Xpert para cada amostra.



- 2 Abrir a tampa do cartucho.

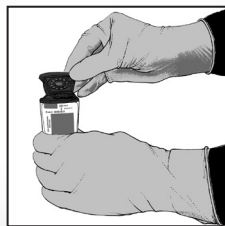

- 3 Aspirar o plasma/soro até imediatamente acima da marca de 1 mL na pipeta.

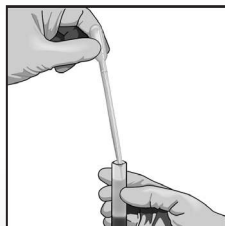

- 4 Esvaziar o conteúdo da pipeta na câmara da amostra.



- 5 Fechar a tampa do cartucho.



- 6 Iniciar o teste dentro do período indicado no folheto informativo.