


# Prelievo dei campioni di analisi da tampone faringeo

## Xpert Xpress Strep A


1

Utilizzare il sistema di prelievo e trasporto ESwab (Copan 480C, 480CE o 480CFA).

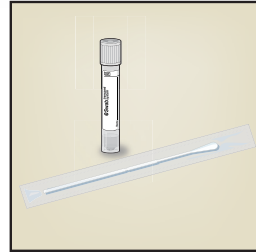


2

Estrarre il tampone, prestando attenzione a non toccare la punta ed evitando di appoggiarlo su una qualsiasi superficie.

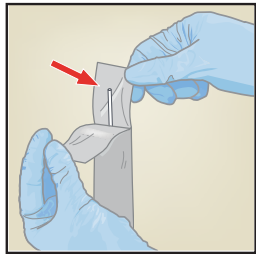


3

Tenere il tampone in mano con il pollice e l'indice al centro dello stelo in corrispondenza della linea perforata.

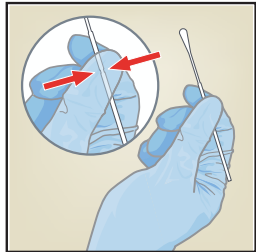


4

Utilizzare il tampone per prelevare delicatamente il campione di analisi dalla parte posteriore della faringe, dalle tonsille o dalle altre aree infiammate come illustrato. Durante il prelievo dei campioni di analisi, evitare di toccare con il tampone la lingua, le guance e i denti.

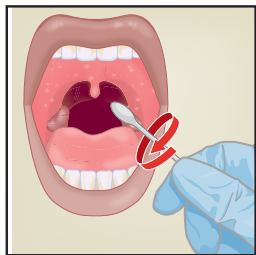


5

Rimuovere il tappo dalla provetta. Non rivolgere verso il basso il lato aperto del tappo né toccare l'interno del tappo. Inserire il tampone nella provetta con il mezzo di trasporto.

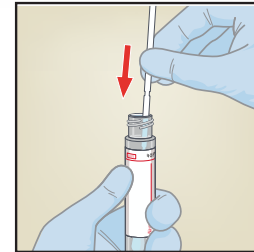


6

Spezzare lo stelo del tampone in corrispondenza della linea pre-incisa, facendo leva contro la parete della provetta.

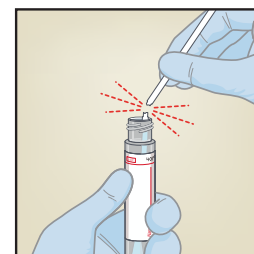

7

Rimettere il tappo sulla provetta e chiudere bene.

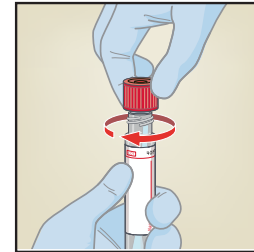

8

Temperatura di trasporto e conservazione dei campioni di analisi (°C)  
A 15–30 °C per un massimo di 48 ore  
A 2–8 °C per un massimo di 6 giorni