

Vorbereitung der Xpert[®] Factor II & Factor V Kartusche

Ausführliche Anweisungen, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise sind der Packungsbeilage zu entnehmen.

Ein Exemplar des SDS (Sicherheitsdatenblatts) ist auf www.cepheid.com oder www.cepheidinternational.com abrufbar

Technischer Kundendienst von Cepheid
US-Niederlassung
(888) 838-3222, Option 2
techsupport@cepheid.com

Europäische Niederlassung
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com




- 1 Ein EDTA- bzw. Natriumcitrat-Probenentnahmeröhrchen beschaffen.



- 2 Eine Xpert Factor II & Factor V Kartusche beschaffen.




- 3 Die Probe durch 5-maliges Umdrehen des Probenröhrchens vorsichtig mischen, bis sie homogen ist.

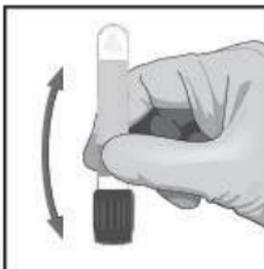

- 4 Den Deckel der Xpert Kartusche öffnen.



- 5 Mit einer Vollpipette mit aerosolresistenter Spitze 50 µl der Probe aspirieren.

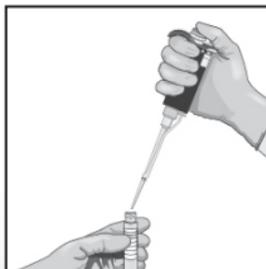

- 6 Die Probe auf den Boden der mit „S“ bezeichneten Kammer der Kartusche transferieren.



- 7 Den Deckel der Xpert Kartusche schließen.



- 8 Die Kartusche laden und den Assay starten.