

# Guía de inicio rápido Xpert® HCV VL Fingerstick

## Material necesario


- 1 Sarstedt Minivette POCT morada desechable (EDTA 100 µL)
- 1 Lanceta de seguridad calibre 18 G, hoja de 1,8 mm o 1,5 mm de profundidad, Sarstedt o equivalente
- 1 Toallita desinfectante con alcohol
- 1 Gasa estéril




- 1
- Póngase guantes.
  - Seleccione la punta del dedo en el que se realizará la punción en la mano no dominante (las zonas adecuadas aparecen sombreadas en azul).
  - Si es necesario, caliente la zona para favorecer el flujo de sangre en el lugar de la punción.




- 2
- Desinfecte el lugar de la punción y déjelo secar al aire.
  - Gire la tapa protectora de la lanceta (1/4 de vuelta) y retírela.

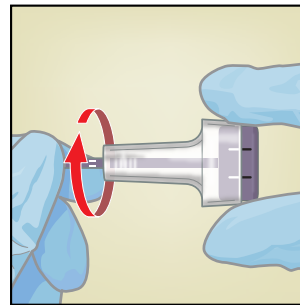


- 3
- Apoye la mano del paciente sobre una superficie estable.
  - Pinche la punta del dedo.
  - Deseche la lanceta de forma segura en un recipiente de residuos adecuado.

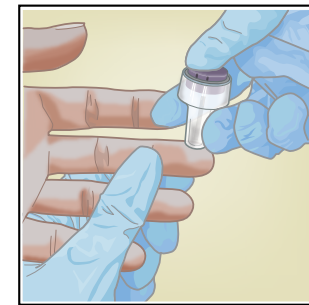


- 4
- Limpiar la primera gota de sangre con una gasa estéril.

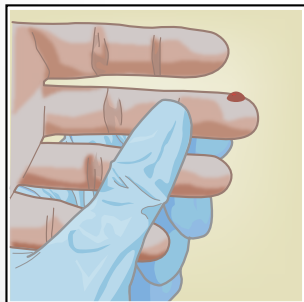

- 5
- Recoja la sangre con la Minivette POCT.
  - **NO:**
    - Cubra el orificio de ventilación.
    - Sujete la Minivette POCT en posición vertical.

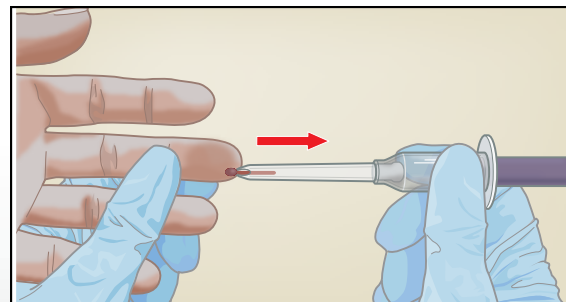

- 6
- La recogida de sangre finaliza cuando la sangre llega al filtro blanco.

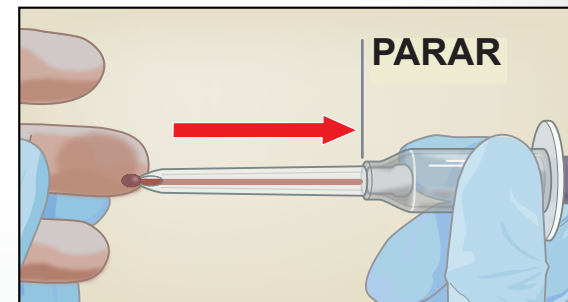





# Guía de inicio rápido Xpert® HCV VL Fingerstick


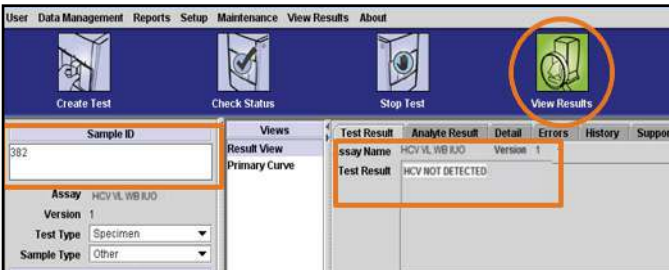

- 1 Tome un cartucho Xpert para cada muestra.  

- 2 Abra la tapa del cartucho.  

- 3 Introduzca completamente la punta del capilar en la cámara de muestra del cartucho y presione ligeramente el pistón hacia abajo para dispensar la muestra de sangre completa. Deseche la Minivette POCT.  

- 4 Cierre firmemente la tapa.  

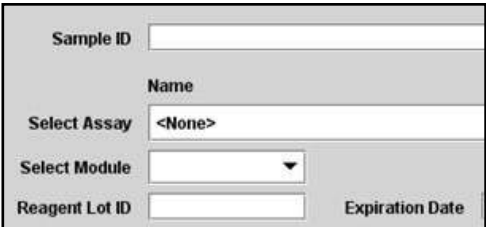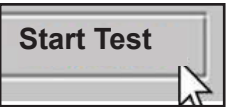
- 5 Haga clic en Crear prueba (Create Test).  

- 6 Escanee el código de barras del cartucho.  

- 7 Escanee o introduzca la Id. muestra (Sample ID).  

- 8 Haga clic en Iniciar prueba (Start Test).  


- 9 Cargue el cartucho en el módulo que tiene la luz verde parpadeante. Cierre la puerta del módulo hasta que encaje y la luz verde deje de parpadear.  

- 10 Haga clic en el icono Ver resultados (View Results). Haga clic en Ver prueba (View Test) en la parte inferior de la pantalla. Seleccione la Id. muestra (Sample ID) correcta.  

- 11 Deseche el cartucho usado.  


Resultados generados en <60 minutos