

Preparación del cartucho Xpert®

- Xpert Xpress SARS-CoV-2
- Xpert Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV
- Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV *plus*
- Xpert Xpress CoV-2 *plus*

Consulte el prospecto, donde encontrará instrucciones, precauciones y advertencias detalladas.

Para obtener un ejemplar de la ficha de datos de seguridad (SDS, Safety Data Sheet), visite www.cepheid.com o www.cepheidinternational.com

La información de contacto de todas las oficinas del servicio técnico de Cepheid está disponible en nuestro sitio web: www.cepheid.com/en/CustomerSupport.




- 1 Tome un cartucho Xpert para cada muestra.



- 2 Invierta rápidamente el tubo 5 veces.




- 3 Abra la tapa del cartucho.

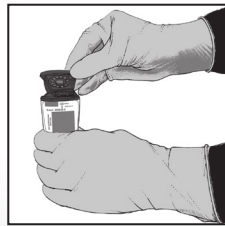

- 4 Con una pipeta limpia de 300 µl (suministrada), transfiera 300 µl (una extracción) de la muestra a la abertura del cartucho.



- 5 Cierre la tapa del cartucho.

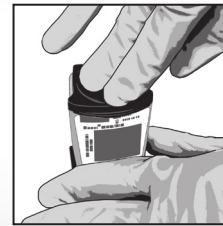

- 6 Comience la prueba dentro del período especificado en el prospecto.