

Preparação do cartucho Xpert[®] MTB/RIF - Sedimento de expectoração



Consulte o folheto informativo para obter instruções detalhadas, precauções e advertências.

Poderá obter um exemplar da FDS em www.cepheid.com ou www.cepheidinternational.com

Assistência Técnica da Cepheid

Filial nos EUA
(888) 838-3222, opção 2
techsupport@cepheid.com

Filial na Europa
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com

1 Adquirir um cartucho Xpert MTB/RIF e um frasco de reagente de amostra para cada amostra. Retire o invólucro de película metalizada.




2 Transfira 0,5 ml de sedimento ressuspenso para um tubo cônico com tampa de rosca. Adicione 1,5 ml de reagente de amostra.




3 Feche bem o recipiente e agite vigorosamente 10 a 20 vezes ou agite no vórtex durante 10 segundos. Incube à temperatura ambiente durante um total de 15 minutos. Entre os 5 e 10 minutos do período de incubação, agite vigorosamente mais 10 a 20 vezes ou agite novamente no vórtex durante pelo menos 10 segundos.



4 Identifique o cartucho do lado esquerdo ou direito. Abra a tampa do cartucho Xpert.

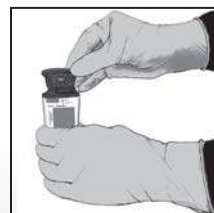

5 aspire a amostra liquefeita até ou imediatamente acima da linha de 2 ml da pipeta.

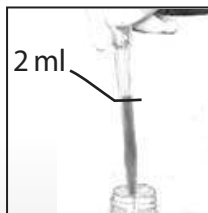

6 Esvazie a pipeta para a câmara de amostras.



7 Feche a tampa do cartucho Xpert.



8 Inicie o teste dentro do período indicado no folheto informativo.

Nota: Um movimento de agitação engloba um movimento para trás e para a frente.