

Klargjøring av Xpert[®]-reagenskassett

- Xpert Xpress SARS-CoV-2
- Xpert Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV
- Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV *plus*
- Xpert Xpress CoV-2 *plus*

Se pakningsvedlegget for detaljerte instruksjoner, forholdsregler og advarsler.

Besøk www.cepheid.com eller www.cepheidinternational.com for å få et eksemplar av sikkerhetsdatabladet.

Kontaktinformasjon for alle Cepheids kontorer for teknisk brukerstøtte finnes på nettstedet vårt: www.cepheid.com/en/CustomerSupport.




1 Ta én Xpert-kassett for hver prøve.



2 Snu prøverøret raskt opp ned 5 ganger.




3 Åpne lokket på reagenskassetten.

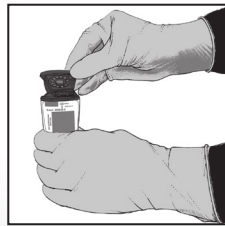

4 Bruk en ren 300 µl pipette (følger med) til å overføre 300 µl (ett trekk) av prøven til åpningen i reagenskassetten.



5 Lukk lokket på reagenskassetten.

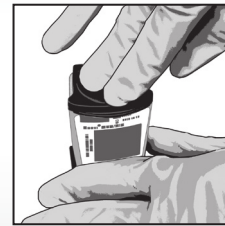

6 Start testen innenfor tidsrammen spesifisert i pakningsvedlegget.