

Preparazione di lisato FFPE* Xpert® *FFPE - fissato in formalina e incluso in paraffina (FFPE)

Per istruzioni dettagliate, avvertenze e precauzioni, fare riferimento al foglietto illustrativo.


Per una copia della SDS, consultare il sito:
www.cepheid.com o
www.cepheidinternational.com

Assistenza Tecnica di Cepheid
Ufficio USA
+1 (888) 838-3222, opzione 2
techsupport@cepheid.com


Ufficio europeo
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com




- 1 Raschiare la sezione di tessuto o macrodissezione dal vetrino.

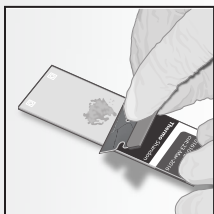


- 2 Trasferire il tessuto alla provetta da 1,5 ml fornita.

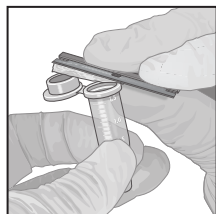


- 3 Aggiungere 1,2 ml di reagente di lisi FFPE nella provetta da 1,5 ml contenente il tessuto FFPE.

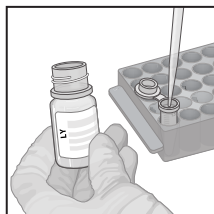

- 4 Aggiungere 20 µl di Proteinasi K (PK) alla stessa provetta da 1,5 ml. Chiudere il coperchio.

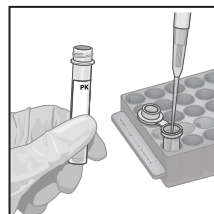


- 5 Vortexare all'impostazione massima per 5 secondi.

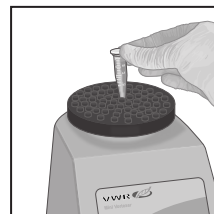


- 6 Microcentrifugare brevemente la provetta per asportare il liquido dal coperchio.



- 7 Incubare il campione a 80 °C per 30 minuti.

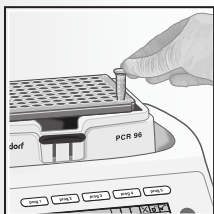


- 8 Vortexare all'impostazione massima per 5 secondi.

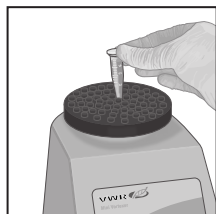

- 9 Microcentrifugare brevemente la provetta per asportare il liquido dal coperchio.




- 10 Trasferire l'intero contenuto nel flaconcino da 5 ml fornito.

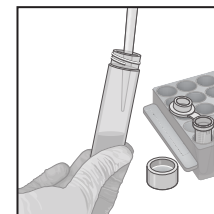

- 11 Aggiungere 1,2 ml di etanolo ≥ 95% allo stesso flaconcino per campioni da 5 ml.



- 12 Tappare bene il flaconcino e vortexare il campione all'impostazione massima per 15 secondi.

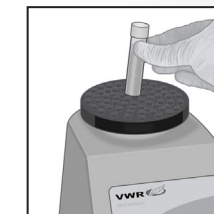

NOTA: Il lisato preparato, con etanolo, è stabile da 2 °C a 8 °C, fino a 1 settimana. E a ≤ -20 °C per massimo 4 settimane.

Preparazione della cartuccia Xpert® Breast Cancer STRAT4

Per istruzioni dettagliate, avvertenze e precauzioni, fare riferimento al foglietto illustrativo.

Per una copia della SDS, consultare il sito:
www.cepheid.com o
www.cepheidinternational.com

Assistenza Tecnica di Cepheid
Ufficio USA
+1 (888) 838-3222, opzione 2
techsupport@cepheid.com

Ufficio europeo
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com



NOTA: Se la preparazione del lisato FFPE, come descritto sul retro di questa scheda, è stata appena completata, è possibile ignorare la fase 2 delle istruzioni riportate di seguito.

- 1 Procurarsi una cartuccia e un lisato FFPE preparato per ciascun campione da testare.




- 2 Vortexare il lisato FFPE per 15 secondi.



- 3 Aprire il coperchio della cartuccia Xpert.



- 4 Pipettare 520 µl di lisato preparato dal flaconcino da 5 ml e trasferirlo nella camera del campione.

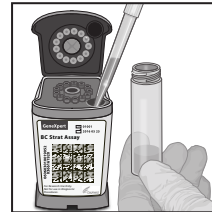

- 5 Chiudere il coperchio della cartuccia Xpert.



- 6 Avviare il saggio entro l'arco di tempo specificato nel foglietto illustrativo.

