

Préparation de la cartouche Xpert® MRSA/SA Blood Culture

Consulter la notice pour obtenir les instructions détaillées, les précautions et les avertissements.

Pour obtenir un exemplaire de la FDS, consulter :
www.cepheid.com ou
www.cepheidinternational.com.

Service d'assistance technique de Cepheid
Bureau aux États-Unis
(888) 838-3222, Option 2
techsupport@cepheid.com

Bureau en Europe
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com



1 Se procurer une cartouche et un flacon de réactif d'éluion.



2 Après avoir mélangé doucement l'échantillon à la main, utiliser la pipette de transfert de 50 µL fournie pour distribuer l'échantillon dans le flacon de réactif d'éluion. Il peut rester du résidu dans la pipette.



3 Fermer le capuchon du réactif d'éluion et mélanger au Vortex à vitesse élevée pendant 10 secondes.



4 Ouvrir le couvercle de la cartouche.



5 À l'aide d'une pipette de transfert propre (non fournie), transférer tout le contenu du flacon de réactif d'éluion dans la chambre échantillon de la cartouche.



6 Fermer le couvercle de la cartouche.



7 Insérer la cartouche et démarrer le test dans le délai précisé dans la notice.

