

Xpert[®] HIV-1 VL - Preparazione della cartuccia

- Xpert[®] HIV-1 Viral Load

Per istruzioni dettagliate, avvertenze e precauzioni fare riferimento al foglietto illustrativo.

Per una copia della scheda di sicurezza (SDS), vedere www.cepheid.com o www.cepheidinternational.com

Assistenza Tecnica di Cepheid

Ufficio USA
(888) 838-3222, opzione 2
techsupport@cepheid.com

Ufficio Europa
+33 563 825 319
support@cepheideurope.com

Prima di iniziare questo test


1. Centrifugare il campione per separare il plasma e i globuli rossi in base alle istruzioni del fabbricante.
2. Far assestare il campione di analisi a temperatura ambiente (20 °C – 35 °C).
3. Miscelare il plasma su vortex per 15 secondi. Se il campione è torbido, chiarificarlo con un rapido giro.




- 1** Per ogni campione prendere una cartuccia Xpert.



- 2** Aprire il coperchio della cartuccia.

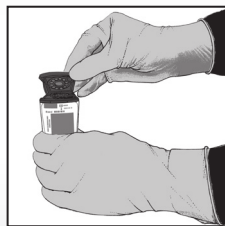


- 3** Aspirare il plasma fino ad appena sopra la tacca sulla pipetta che indica 1 mL.

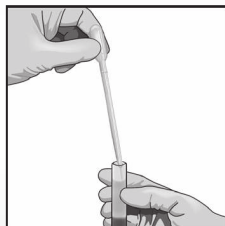

- 4** Svuotare il contenuto nella camera per il campione.



- 5** Chiudere il coperchio della cartuccia.

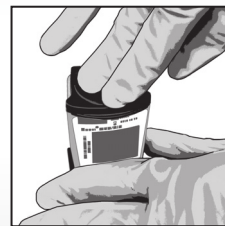

- 6** Iniziare il test entro l'intervallo di tempo specificato nel foglietto illustrativo.