

# Vorbereitung der Xpert® Carba-R Kartusche bei Verwendung einer rektalen oder perirektalen Abstrichprobe

Ausführliche Anweisungen, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise sind der Packungsbeilage zu entnehmen.

Ein Exemplar des Sicherheitsdatenblatts ist erhältlich unter [www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) oder [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com)

Technischer Kundendienst von Cepheid  
Büro USA  
(888) 838-3222  
[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)


Europäische Niederlassung  
+33 563 82 53 19  
[support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)




1 Für jede Probe eine Xpert Kartusche und ein Fläschchen mit Probenreagenz besorgen.



2 Den Tupfer in das Fläschchen mit Probenreagenz einführen.

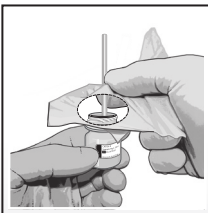

3 Den Tupfer nahe der Fläschchenöffnung an der Sollbruchstelle abbrechen.

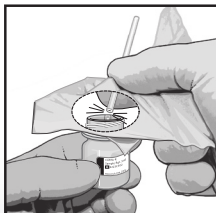


4 Das Fläschchen mit Probenreagenz wieder verschließen und 10 Sekunden lang vortexen.



5 Den Deckel der Xpert Kartusche öffnen.



6 Das Probenreagenz bis zur Linie in die mitgelieferte Pipette aufziehen.

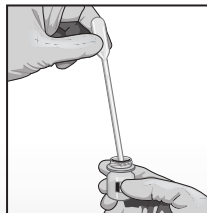

7 Die Pipette langsam in die Probenkammer entleeren.



8 Den Deckel der Xpert Kartusche schließen.



9 Den Test innerhalb des in der Packungsbeilage angegebenen Zeitrahmens starten.

Hinweis: Den Tupfer nicht unterhalb der Sollbruchstelle halten. Zur Minimierung des Kontaminationsrisikos Gaze oder Ähnliches verwenden.