

Préparation de la cartouche Xpert® *montrant l'échantillon d'urine ou l'écouvillon dans le tube de réactif de transport.*

- Xpert CT/NG
- Xpert TV


Consultez la notice pour obtenir les instructions détaillées, les précautions et les avertissements.

Pour obtenir un exemplaire de la fiche technique de données de sécurité (SDS, Safety Data Sheet), consulter : www.cepheid.com ou www.cepheidinternational.com

Service d'assistance technique de Cepheid
Bureau aux États-Unis
(888) 838-3222, choix 2
techsupport@cepheid.com
Bureau en Europe
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com




1 Se procurer un tube de réactif de transport prélevé et étiqueté de manière appropriée.

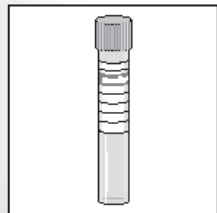


2 Se procurer une cartouche Xpert et une pipette de transfert (fournies dans le kit de test).




3 Ouvrez le couvercle de la cartouche Xpert.

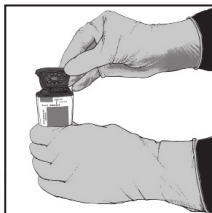

4 Retournez délicatement le tube de transfert 3 à 4 fois pour mélanger.

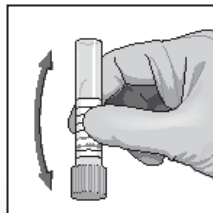


5 Remplir la pipette de transfert au-dessus de la marque sur le corps de la pipette.

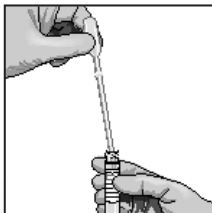

6 Videz le contenu de la pipette dans la chambre de l'échantillon.



7 Fermez le couvercle de la cartouche Xpert.

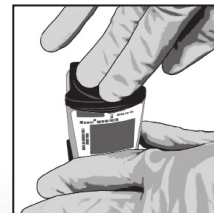

8 Insérez la cartouche et lancer le test.



Préparation de la cartouche Xpert® montrant l'échantillon d'urine dans le flacon de prélèvement principal.

- Xpert CT/NG
- Xpert TV


Consultez la notice pour obtenir les instructions détaillées, les précautions et les avertissements.

Pour obtenir un exemplaire de la fiche technique de données de sécurité (SDS, Safety Data Sheet), consulter : www.cepheid.com ou www.cepheidinternational.com


Service d'assistance technique de Cepheid
Bureau aux États-Unis
(888) 838-3222, choix 2
techsupport@cepheid.com
Bureau en Europe
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com




1 Obtenir un échantillon d'urine de premier jet dans le flacon de prélèvement principal. Avant de transférer une quantité aliquote dans le tube de réactif de transport d'urine Xpert, s'assurer de bien mélanger l'urine dans le flacon d'urine.

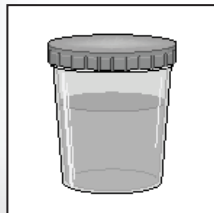

2 Obtenir un kit de prélèvement d'échantillon d'urine Xpert.

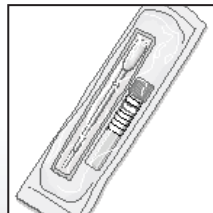


3 Ouvrir l'emballage d'une pipette de transfert jetable fournie dans le kit de prélèvement d'échantillon d'urine Xpert. *REMARQUE : NE PAS utiliser la pipette du kit du test.*

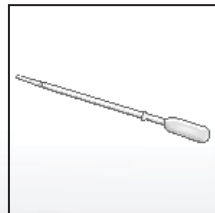


4 Introduisez la pipette de transfert jusqu'au fond du flacon de prélèvement d'urine.



5 Transférer environ 7 ml d'urine, de sorte que le volume atteigne la ligne de pointillés noirs sur l'étiquette du tube.

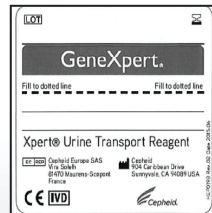

6 Remplacez le bouchon sur le tube de réactif de transport d'urine et bien fermer. Étiquetez de façon appropriée et transférez à la zone de préparation de la cartouche de test GeneXpert.

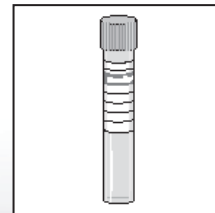

7 Veuillez consulter le dos de cette carte pour plus d'informations.