


Xpert® HPV v2 Klargjøring av reagenskasset

Se bruksanvisningen for detaljerte instruksjoner, forholdsregler og advarsler.

1

Ta én prøve som er samlet inn og merket på riktig måte.

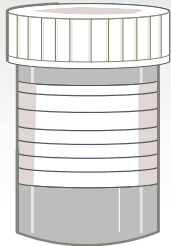


2

Skaff en Xpert HPV v2-reagenskasset og overføringspipette (følger med). Linjen på pipetten angir fyllingsvolum på 1 ml. Merk reagenskassetten med prøveidentifikasjon.



3

Inspiser testreagenskassetten med henblikk på skade. Ikke bruk den hvis den er skadet. Åpne lokket på reagenskassetten.

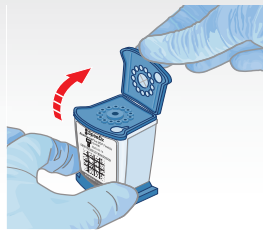

4

Bland prøven ved å varsomt vende prøverøret opp ned 8 til 10 ganger, eller ved å vortex-blande kort i en vortex-blander på halv hastighet kontinuerlig i 5 sekunder.




5

Pakk ut overføringspipetten. Åpne lokket på prøverøret, klem ballongen på overføringspipetten, sett pipetten inn i røret og slipp opp ballongen for å fylle overføringspipetten til 1 ml-linjen. Kontroller at pipetten er fylt, og at det ikke er bobler i den.



6

Trykk pipettens innhold ut i reagenskassetts prøvekammer. Unngå for mye slim i kassetten.

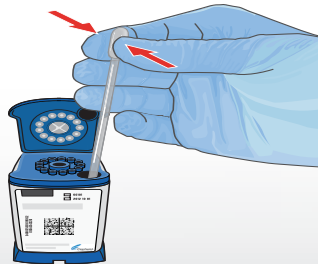

7

Lukk reagenskassettilokket og start testen innen tidsrammen som er angitt i pakningsvedlegget.

