



<b>Kit con i reagenti per il test</b>	Xpert Bladder Cancer Monitor			
<b>Numero di catalogo</b>	GXBLAD-CM-CE-10			
<b>Tecnologia</b>	RT-PCR real time			
<b>Bersagli</b>	Cinque bersagli mRNA: UPK1B, IGF2, CRH, ANXA10, ABL1			
<b>Batch o on-demand</b>	On-Demand			
<b>Dimensioni minime del batch</b>	1			
<b>Tipi di campioni</b>	Urina escreta (non da primo mitto)			
<b>Estrazione del campione</b>	Automatica/integrata			
<b>Tempo di acquisizione dei risultati (TAT)</b>	Circa 90 minuti			
<b>Controlli: controllo dell'adeguatezza dei campioni</b>	ABL1			
<b>Controlli: rilevamento/ funzionamento della sonda</b>	Controllo per la verifica della sonda			
<b>Controlli: controllo interno</b>	Armored RNA®			
<b>Confronto delle prestazioni tra Xpert Bladder Cancer Monitor e cistoscopia/istologia</b>				
	(N=255)	<b>Totale</b>	<b>Basso grado</b>	<b>Alto grado</b>
<b>Sensibilità</b>	75,0%		63,2%	84,0%
<b>Specificità</b>	80,6%		N/A	N/A
<b>Valore predittivo negativo</b>	93,9%			
<b>Valore predittivo positivo</b>	44,6%			
<b>Conservazione e stabilità del campione</b>	I campioni di urina nelle provette con reagente per trasporto di urina Xpert sono stabili fino a 7 giorni se conservati a una temperatura di 2–28 °C			
<b>Conservazione del kit</b>	2–28 °C			
<b>Altri materiali necessari</b>	Kit con reagente per trasporto di urina Xpert <b>Numero di catalogo:</b> GXUTR-CE-30			
<b>Controlli commerciali</b>	Acquistabili da terze parti Contattare l'assistenza tecnica (e-mail: <a href="mailto:techsupport@cepheid.com">techsupport@cepheid.com</a> ) per ulteriori informazioni.			

CE-IVD. Dispositivo medico diagnostico *in vitro*. Non disponibile in tutti i Paesi. Non disponibile negli Stati Uniti.

#### SEDE CENTRALE

904 Caribbean Drive  
Sunnyvale, CA 94089, USA

NUMERO VERDE USA +1.888.336.2743  
TELEFONO +1.408.541.4191  
FAX +1.408.541.4192

#### SEDE EUROPEA

Vira Soleth  
81470 Maurens-Scopont Francia

TELEFONO +33.563.82.53.00  
FAX +33.563.82.53.01  
E-MAIL [cepheid@cepheideurope.fr](mailto:cepheid@cepheideurope.fr)

[www.Cepheidinternational.com](http://www.Cepheidinternational.com)