

# Procedimiento de repetición de la prueba Xpert

- Xpert C. difficile BT
- Xpert MRSA/SA SSTI
- Xpert vanA/vanB

Consulte el prospecto para obtener instrucciones, precauciones y advertencias detalladas.

Para obtener un ejemplar de la SDS (hoja de datos de seguridad), visite [www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) o [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com)

Servicio técnico de Cepheid  
Oficina en EE. UU.  
+1 (888) 838-3222, opción 2  
[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)  
Oficina de Europa  
+33 563 825 319  
[support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)

Siga este procedimiento de repetición de la prueba en las 3 horas siguientes a un **ERROR, NO VÁLIDO (INVALID)** o **SIN RESULTADO (NO RESULT)**.

De lo contrario:

Repita la prueba con la muestra restante si el volumen es suficiente  
o


Recoja una nueva muestra y procese la muestra conforme al prospecto.



- 1 Retenga el cartucho usado. Obtenga un nuevo cartucho Xpert y un nuevo vial de reactivo para muestras.




- 2 Transfiera todo el contenido restante de la cámara de muestras del cartucho usado a un nuevo vial de reactivo para muestras.

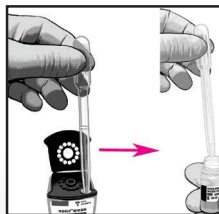

- 3 Vuelva a tapar el vial del reactivo para muestras y agítelo en una mezcladora vorticial durante 10 segundos.



- 4 Abra la tapa del nuevo cartucho Xpert.

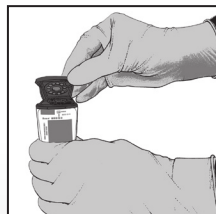

- 5 Con ayuda de una pipeta de transferencia desechable, aspire todo el contenido del vial del reactivo para muestras.



- 6 Vacíe la pipeta en la cámara de la muestra.



- 7 Cierre la tapa del cartucho Xpert e inicie la prueba dentro de los límites de tiempo especificados en el prospecto.

