

Przygotowanie kartridża Xpert®

- Xpert Xpress SARS-CoV-2
- Xpert Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV
- Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV *plus*
- Xpert Xpress CoV-2 *plus*

**Szczegółowe informacje,
środki ostrożności i
ostrzeżenia zamieszczono
w ulotce informacyjnej.**

Kopia karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej (SDS, Safety Data Sheet)
jest dostępna na stronie www.cepheid.com
lub www.cepheidinternational.com

Dane kontaktowe wszystkich oddziałów
Centrum wsparcia klienta firmy Cepheid
są dostępne na naszej stronie internetowej:
www.cepheid.com/en/CustomerSupport.




1 Dla każdej próbki potrzebny jest jeden kartridż Xpert.



2 Szybko odwrócić probówkę 5 razy.




3 Otworzyć wieczko kartridża.

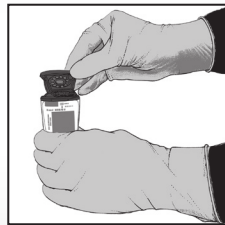

4 Używając czystej 300 µl pipety (dostarczonej), przenieść 300 µl (jedno zaciągnięcie) próbki do otworu kartridża.



5 Zamknąć wieczko kartridża.

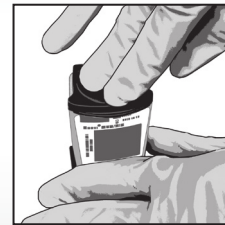

6 Rozpocząć test w czasie określonym w ulotce informacyjnej.