


Pobieranie próbek wymazów z nosa


1

Otwórz opakowanie z wymazówką i probówką z podłożem transportowym. Przed pobraniem próbki odłóż probówkę na bok.

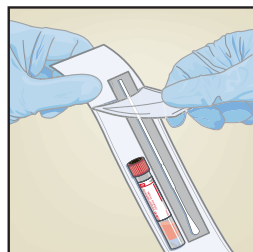


2

Otwórz opakowanie wymazówki i wyjmij ją, uważając aby nie dotknąć jej końcówką żadnej powierzchni.

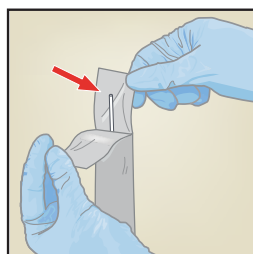

3

Trzymaj wymazówkę dłonią, ściskając środek jej trzonu, w miejscu oznaczonym linią.

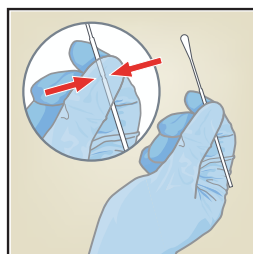

4

Obracaj wymazówkę przez 3 sekundy, dociskając ją do wnętrza nozdrza, a jednocześnie palcem dociskając wymazówkę od zewnętrznej strony nozdrza.


Nie wprowadzaj wymazówek na głębokość większą niż 1–1,5 cm.



5


Powtórz krok 4 dla drugiego nozdrza, używając tej samej wymazówki.

Aby uniknąć zanieczyszczenia próbki, po pobraniu próbki nie dotykaj niczego końcówką wymazówki.

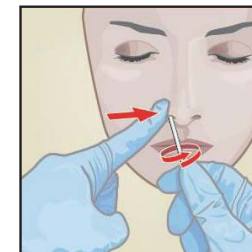

6


Zdejmij nakrętkę z probówki. Włóż wymazówkę w podłoże transportowe.

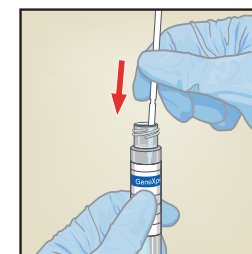

7

Złam trzon wymazówki, dociskając go do bocznej ścianki probówki, na poziomie oznaczonym linią.

Należy uważać, aby nie doszło do rozprysnięcia zawartości na skórę. Jeżeli dojdzie do kontaktu ze skórą, umyć takie miejsce mydłem i wodą.

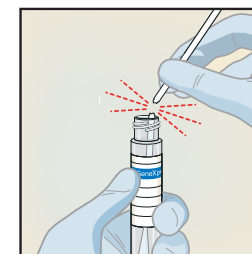

8

Nalóż zakrętkę na probówkę i szczelnie zakręć.

