

# Preparación del cartucho del Xpert® Bladder Cancer

mostrando una muestra de orina

Consulte el prospecto para obtener instrucciones, precauciones y advertencias detalladas.


Para obtener un ejemplar de la SDS (hoja de datos de seguridad), visite [www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) o [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com)

Servicio técnico de Cepheid  
Oficina en EE.UU.  
(888) 838-3222  
[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)

Oficina de Europa  
+33 563 82 53 19  
[support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)



1 Obtenga una muestra de orina adecuadamente recogida y etiquetada.

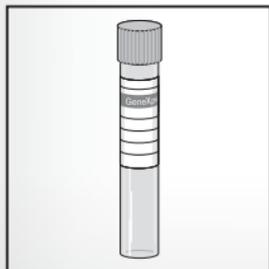


2 Obtenga un cartucho del Xpert Bladder Cancer y una pipeta de transferencia (suministrada).




3 Abra la tapa del cartucho Xpert.



4 Invierta suavemente el tubo de transporte 3 veces para mezclar su contenido.

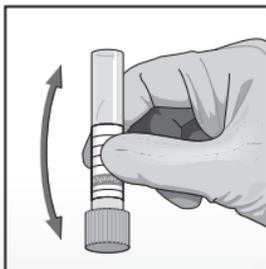

5 Llene la pipeta de transferencia con muestra hasta la marca de 4 ml.

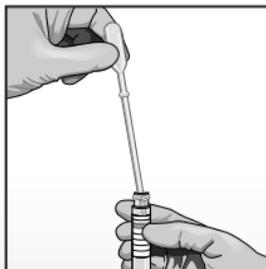


6 Vacíe el contenido de la pipeta en la cámara de muestras.



7 Cierre la tapa del cartucho Xpert.



8 Introduzca el cartucho e inicie el ensayo.

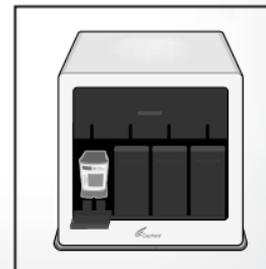

# Preparación del cartucho del Xpert® Bladder Cancer mostrando una muestra de orina en el recipiente de muestras primario

Consulte el prospecto para obtener instrucciones, precauciones y advertencias detalladas.

Para obtener un ejemplar de la SDS (hoja de datos de seguridad), visite [www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) o [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com)

Servicio técnico de Cepheid  
Oficina en EE.UU.  
(888) 838-3222  
[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)


Oficina de Europa  
+33 563 82 53 19  
[support@cepheid.com](mailto:support@cepheid.com)




1 Obtenga una muestra de orina de al menos 4,5 ml en el recipiente de recogida primario.




2 Obtenga un kit de reactivo de transporte de orina Xpert.

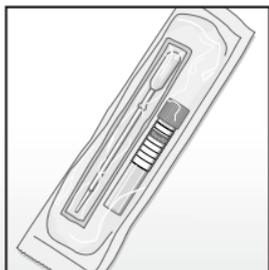


3 Invierta el recipiente 3 veces para mezclar la orina.

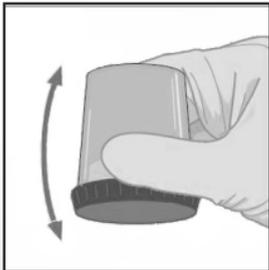


4 Utilice la pipeta de transferencia desechable suministrada en el kit de reactivo de transporte de orina Xpert en la bolsa con el tubo. NOTA: No utilice la pipeta del kit del ensayo.

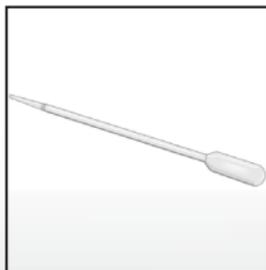


5 Introduzca la pipeta de transferencia en la parte inferior del recipiente de orina.

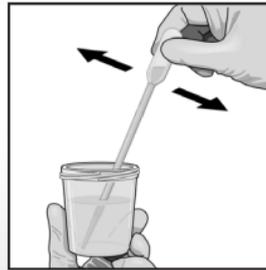

6 Transfiera aproximadamente 4,5 ml de orina de forma que el volumen llegue a la línea negra que hay en la etiqueta del tubo.

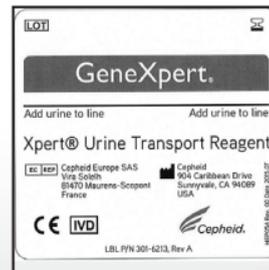

7 Vuelva a colocar la tapa de transporte de orina Xpert y ajústela bien. Etiquete correctamente el tubo y llévalo a la zona de preparación de cartuchos del GeneXpert.

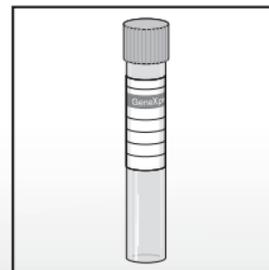

8 Para obtener más instrucciones, consulte el dorso de esta tarjeta.

