



Colheita de amostras de zaragatoa nasal


1 Abra a embalagem que contém a zaragatoa e o tubo de meio de transporte. Ponha o tubo de lado antes de colher a amostra.

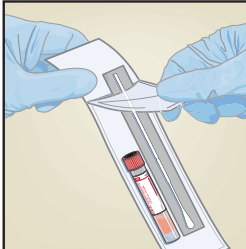

2 Abra o invólucro da zaragatoa e retire a zaragatoa, tendo cuidado para não tocar com a ponta da zaragatoa em qualquer superfície.

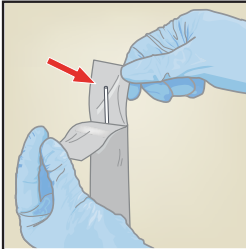


3 Segure a zaragatoa na sua mão, colocando o polegar e o dedo indicador na parte média da haste da zaragatoa sobre a linha perforada.

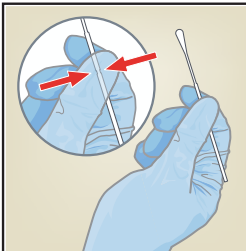


4 Rode a zaragatoa no interior da narina durante 3 segundos enquanto aplica pressão com um dedo na parte de fora da narina.

Não insira as zaragatoas mais de 1 cm a 1,5 cm.




5 Repita o passo 4 na outra narina com a mesma zaragatoa.

Para evitar a contaminação da amostra, não toque com a ponta da zaragatoa em qualquer local depois de colher a amostra.




6 Retire a tampa do tubo. Introduza a zaragatoa no meio de transporte.

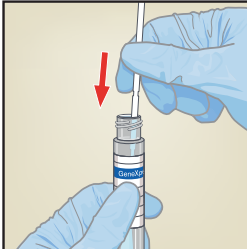

7 Parta a haste da zaragatoa contra a parte lateral do tubo na linha perforada.

Evite que pingue sobre a pele. Em caso de contacto, lave com água e sabonete.

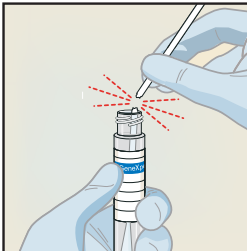

8 Volte a colocar a tampa no tubo e aperte-a bem.

