



# Raccolta di campioni di analisi nasofaringei

Per l'uso con il kit Xpert® per la raccolta di campioni nasofaringei - N. catalogo SWAB/B-100


1 .....  
Aprire la confezione contenente il tampone e la provetta del mezzo di trasporto. Mettere da parte la provetta prima del prelievo del campione di analisi.

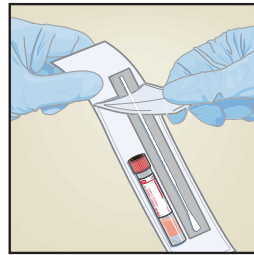


2 .....  
Aprire la confezione ed estrarre il tampone, facendo attenzione a non permettere che la sua punta tocchi qualsiasi superficie.

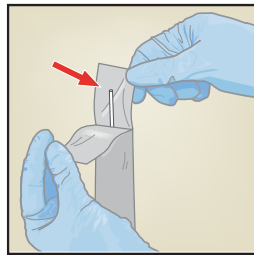

3 .....  
Afferrare il tampone tenendo saldamente tra le dita la parte centrale dello stelo sulla linea perforata.

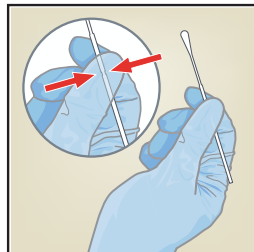


4 .....  
Inserire delicatamente il tampone nella narice fino a toccare il tratto nasofaringeo posteriore.

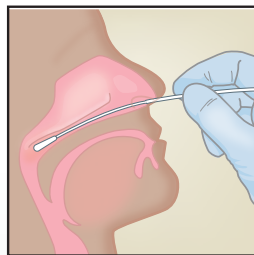


Ruotare il tampone diverse volte.

5 .....  
Rimuovere il tappo dalla provetta. Inserire il tampone nel mezzo di trasporto.

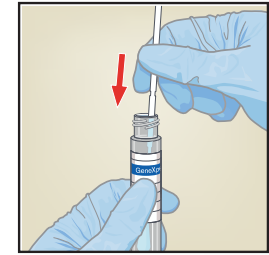

6 .....  
Spezzare lo stelo del tampone, in corrispondenza della linea perforata, contro il lato della provetta.  
Evitare di schizzare il contenuto sulla pelle. Se il contenuto dovesse venire a contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone.

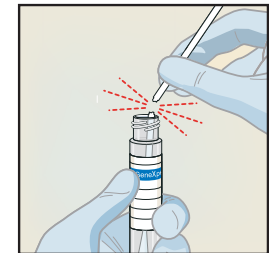

7 .....  
Rimettere il tappo sulla provetta e chiudere bene.

