

Vorbereitung der Xpert® MRSA/SA Blood Culture Kartusche

Ausführliche Anweisungen, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise sind der Packungsbeilage zu entnehmen.

Ein Exemplar des SDS (Sicherheitsdatenblatts) ist auf www.cepheid.com oder www.cepheidinternational.com abrufbar.

Technischer Kundendienst von Cepheid
US-Niederlassung (888) 838-3222, Option 2
techsupport@cepheid.com

Europäische Niederlassung
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com



- 1 Eine Kartusche und ein Fläschchen mit Elutionsreagenz beschaffen.




- 2 Die Probe vorsichtig von Hand mischen und mit der beiliegenden 50- μ l-Transferpipette die Probe in das Fläschchen mit Elutionsreagenz geben. Eventuell bleibt eine Restmenge in der Pipette zurück.



- 3 Das Fläschchen mit Elutionsreagenz mit dem Deckel verschließen und 10 Sekunden lang bei hoher Geschwindigkeit im Vortex mischen.



- 4 Den Kartuschendeckel öffnen.

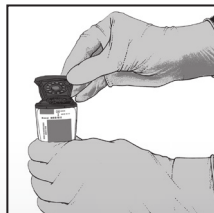

- 5 Mit einer sauberen Transferpipette (nicht mitgeliefert) den gesamten Inhalt des Fläschchens mit Elutionsreagenz in die Probenkammer der Kartusche transferieren.



- 6 Den Kartuschendeckel schließen.



- 7 Die Kartusche einsetzen und den Assay innerhalb des in der Packungsbeilage angegebenen Zeitrahmens starten.

