

Xpert® Xpress Flu/RSV – forberedelse av reagenskasset

- Xpert® Xpress Flu/RSV

instruksjoner, forholdsregler og advarsler.

Et eksemplar av sikkerhetsdatabladet finnes på www.cepheid.com eller www.cepheidinternational.com

Kontor i USA
(888) 838-3222, alternativ 2
techsupport@cepheid.com
Kontor i Europa
+33 563 825 319
support@cepheideurope.com



Se pakkingsvedlegget for detaljerte

Cepheids tekniske brukerstøtte


- 1** Ta én Xpert-reagenskasset for hver prøve.



- 2** Vend prøverøret opp ned 5 ganger.




- 3** Åpne lokket på reagenskassetten.

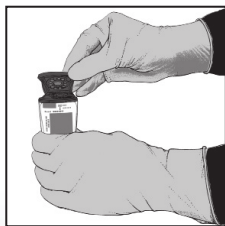

- 4** Bruk en ren 300 µl-pipette (følger med) for å overføre 300 µl (ett trekk) av prøven til åpningen i reagenskassetten.



- 5** Lukk lokket på reagenskassetten.

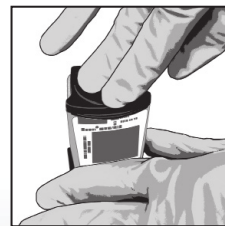

- 6** Start testen innenfor tidsrammen spesifisert i pakkingsvedlegget.