

Preparazione della cartuccia Xpert® MTB/RIF Ultra - Espettorato non trattato

Per istruzioni dettagliate, avvertenze e precauzioni, fare riferimento al foglietto illustrativo.

Per una copia della SDS, consultare il sito:
www.cepheid.com o
www.cepheidinternational.com

Assistenza Tecnica di Cepheid
Ufficio USA
+1 (888) 838-3222
techsupport@cepheid.com

Ufficio europeo
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com




- 1 Procurarsi una cartuccia Xpert, un reagente per il campione (SR) e un contenitore di raccolta dell'espettorato per ciascun campione.



- 2 Stimare il volume dell'espettorato. Aggiungere 2 volumi di SR a 1 volume di espettorato. Reinstallare i coperchi dei contenitori.



- 3 • Scuotere* vigorosamente per 10-20 volte o agitare su vortex per almeno 10 secondi.
• Lasciare in incubazione a temperatura ambiente per 10 minuti.
• Scuotere di nuovo vigorosamente per 10-20 volte.
• Lasciare in incubazione per altri 5 minuti. ** Vedere la nota qui sotto.

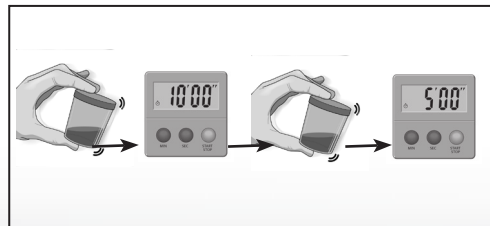


Nota: il volume minimo di espettorato per un test è di 1 ml


Nota: * un movimento avanti e indietro equivale a un singolo scuotimento.

Nota: ** agitare e incubare per altri 5 minuti se il campione non è completamente liquefatto.

- 4 Scrivere sul lato della cartuccia o applicare un'etichetta con l'ID. Aprire la cartuccia.

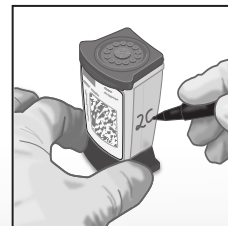

- 5 Aspirare il campione liquefatto fino appena al di sopra della linea di riempimento della pipetta.

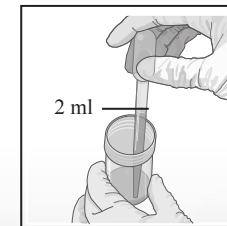

- 6 Svuotare lentamente il campione nella camera del campione della cartuccia.



- 7 Chiudere bene il coperchio. Iniziare il test entro l'intervallo di tempo specificato nel foglietto illustrativo.

