

Preparação do cartucho Xpert[®] HIV-1 Qual XC *utilizando sangue total*

Consulte as instruções detalhadas, as precauções e as indicações de atenção no folheto informativo.

Para obter uma cópia da FDS, visite www.cepheid.com ou www.cepheidinternational.com

Assistência técnica da Cepheid

Filial nos EUA
(888) 838-3222, opção 2
techsupport@cepheid.com

Delegação na Europa
+33 563 825 319
support@cepheideurope.com


Antes de iniciar o procedimento, deixe que o cartucho e a amostra se aclimatem à temperatura ambiente (15 – 30 °C).



1 Misture o sangue total em EDTA invertendo o frasco pelo menos 7 vezes.



2 Identifique o lado do cartucho com a ID do paciente.

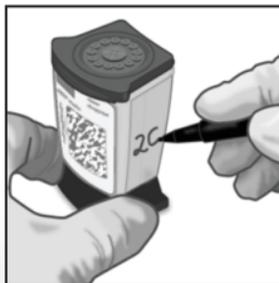

3 Abra a tampa do cartucho.



4 Encha a pipeta com 100 µl de sangue total em EDTA apertando o bolbo para garantir que não ficam bolhas.




5 Transfira imediatamente o sangue total em EDTA para a câmara da amostra.



6 Feche a tampa do cartucho.



7 Comece o teste no período de 4 horas.

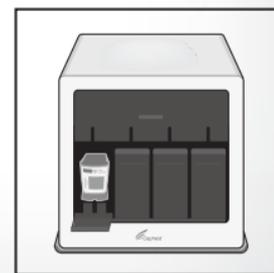

Preparação do cartucho Xpert[®] HIV-1 Qual XC *utilizando gotas de sangue seco*

Consulte as instruções detalhadas, as precauções e as indicações de atenção no folheto informativo.

Para obter uma cópia da FDS, visite www.cepheid.com ou www.cepheidinternational.com

Assistência técnica da Cepheid
Delegação nos EUA (888) 838-3222, opção 2
techsupport@cepheid.com

Delegação na Europa +33 563 825 319
support@cepheideurope.com

Antes de iniciar o procedimento:

- Deixe que o cartucho e a amostra se aclimatem à temperatura ambiente (15 – 30 °C).
- Assegure-se de que o cartão seca ao ar, à temperatura ambiente (15 – 30 °C), durante pelo menos 4 horas.
- Limpe as tesouras/pinças utilizando lixívia a 10% e deixe secar entre cada amostra.




1 Identifique o lado do cartucho com a ID da amostra.



2 Abra a tampa do cartucho.




3 Corte uma GSS do cartão de papel de filtro para cada amostra, seguindo a linha tracejada e utilizando uma tesoura esterilizada. Se a linha tracejada for perfurada, utilize uma pinça para destacar a GSS.

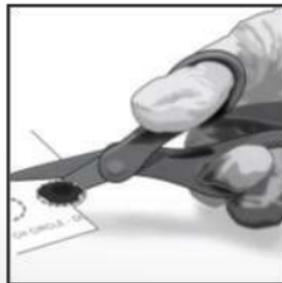

4 Utilizando uma pinça, introduza a GSS na câmara da amostra.



5 Empurre a GSS para baixo até chegar ao funco da câmara com a pinça.

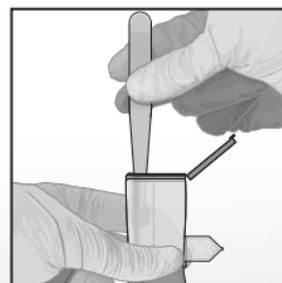

6 Feche a tampa do cartucho.



7 Inicie o teste dentro de 4 horas após a adição da amostra.

