

Préparation de la cartouche Xpert® Xpress GBS

Se reporter à la notice d'utilisation pour prendre connaissance des instructions détaillées, des précautions et des avertissements.

Support Technique de Cepheid
Bureau aux États-Unis
(888) 838-3222
techsupport@cepheid.com

Pour obtenir un exemplaire de la FDS, consulter le site www.cepheid.com ou www.cepheidinternational.com

Bureau en Europe
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com




1 Se procurer une cartouche.



2 Ouvrir le couvercle de la cartouche.



3 Retirer un écouvillon du capuchon et frotter délicatement les deux écouvillons ensemble en les tournant l'un autour de l'autre pendant cinq secondes. Remettre le deuxième écouvillon encore attaché au capuchon dans le tube de transport.

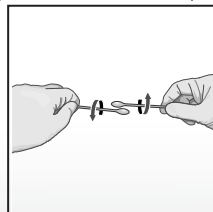

Remarque : ne pas tenir l'écouvillon en dessous de la rainure

4 Insérer l'écouvillon dans la chambre à échantillon de la cartouche. Casser l'écouvillon au niveau de la rainure.



Remarque : Utiliser de la gaze ou un équivalent pour limiter le risque de contamination.

5 S'assurer que l'écouvillon peut flotter librement dans la chambre.



Mise en place incorrecte de l'écouvillon. L'extrémité de l'écouvillon est prise dans l'encoche de l'ouverture de la chambre à échantillon.



6 Fermer le couvercle de la cartouche. Démarrer le test dans le délai précisé dans la notice d'utilisation.



Procédure de répétition du test Xpert

• Xpert® Xpress GBS

Se reporter à la notice d'utilisation pour prendre connaissance des instructions détaillées, des précautions et des avertissements.

Pour obtenir un exemplaire de la FDS, consulter le site www.cepheid.com ou www.cepheidinternational.com

Support Technique de Cepheid
Bureau aux États-Unis
(888) 838-3222, Option 2
techsupport@cepheid.com

Bureau en Europe
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com



1 Éliminer la cartouche usagée. Se procurer une nouvelle cartouche Xpert® Xpress GBS. Retirer l'écouvillon restant du tube de transport de prélèvement.



2 Insérer l'écouvillon dans la chambre échantillon de la nouvelle cartouche. Relever l'écouvillon afin de positionner la rainure dans l'encoche. Casser l'écouvillon en abaissant d'un coup sec vers la droite.



3 S'assurer que l'écouvillon est correctement positionné dans la cartouche et que son extrémité n'est pas dans l'encoche de l'ouverture de la chambre à échantillon et n'empêche pas la fermeture du couvercle.



4 Si l'écouvillon est coincé dans l'encoche, utiliser une lingette/gaze non pelucheuse ou l'extrémité restante de l'écouvillon pour le dégager de l'encoche afin de réduire le risque de contamination.



5 Fermer le couvercle de la cartouche. Démarrer le test dans le délai précisé dans la notice d'utilisation.

