

Procédure de répétition du test Xpert

- Xpert C. difficile BT
- Xpert MRSA/SA SSTI
- Xpert vanA/vanB

Se reporter à la notice pour obtenir les instructions détaillées, les précautions et les avertissements.

Pour obtenir un exemplaire de la FDS, consulter le site www.cepheid.com ou www.cepheidinternational.com

Service d'assistance technique
Cepheid

Bureau aux États-Unis
+1 (888) 838-3222, choix 2
techsupport@cepheid.com

Bureau en Europe
+33 563 825 319
support@cepheideurope.com

Suivre cette procédure de répétition du test dans les 3 heures suivant un résultat **ERREUR (ERROR), NON VALIDE (INVALID),** ou **PAS DE RÉSULTAT (NO RESULT).**


Sinon :
Procéder à un retest avec l'échantillon restant si le volume est suffisant ou
Prélever un nouvel échantillon et traiter l'échantillon conformément à la notice.



- 1 Conserver la cartouche usagée. Obtenir une nouvelle cartouche Xpert et un nouveau flacon de réactif échantillon.




- 2 Transférer tout le contenu restant de la chambre de l'échantillon de la cartouche usagée vers un nouveau flacon de réactif échantillon.

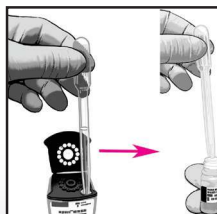


- 3 Reboucher le flacon de réactif échantillon et agiter au vortex pendant 10 secondes.



- 4 Ouvrir le couvercle de la nouvelle cartouche Xpert.

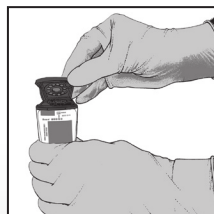

- 5 Aspirer tout le contenu du flacon de réactif échantillon à l'aide d'une pipette de transfert jetable.

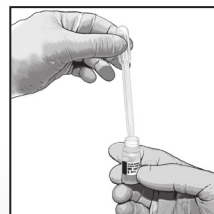

- 6 Vider la pipette dans la chambre de l'échantillon.



- 7 Fermer le couvercle de la cartouche Xpert et démarrer le test dans le délai précisé dans la notice.

