



Prélèvement d'échantillon nasopharyngé

À utiliser avec le kit Xpert® de prélèvement d'échantillon nasopharyngé - N° de réf. SWAB/B-100


1 Ouvrez l'emballage qui contient l'écouvillon et le tube de milieu de transport. Mettez le tube de côté avant de prélever l'échantillon.

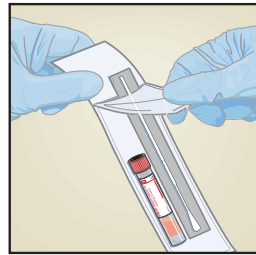


2 Ouvrez l'emballage et sortez l'écouvillon, en prenant soin de ne mettre son extrémité en contact avec aucune surface.

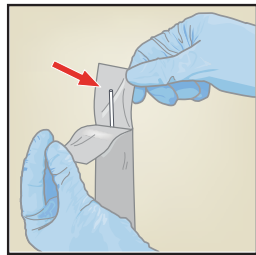

3 Tenez l'écouvillon dans votre main, en pinçant au milieu de la tige de l'écouvillon sur la ligne de cassure.

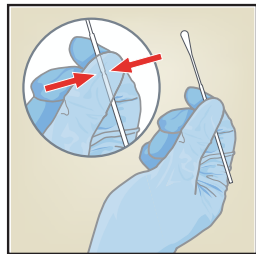


4 Insérez délicatement l'écouvillon dans la narine jusqu'à ce qu'il touche le nasopharynx postérieur.

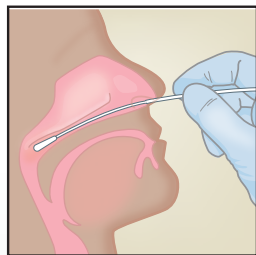


Tournez l'écouvillon plusieurs fois.

5 Retirez le bouchon du tube. Insérez l'écouvillon dans le milieu de transport.

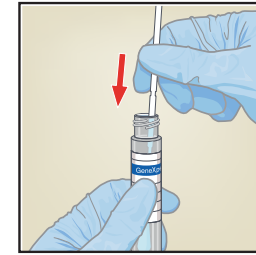

6 Cassez la tige de l'écouvillon contre la paroi du tube au niveau de la ligne de cassure.

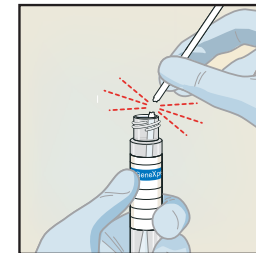

7 Évitez d'éclabousser le contenu sur la peau. Lavez-vous au savon et à l'eau en cas d'exposition.

7 Remettez le bouchon sur le tube et vissez-le bien.

