

Procedura di ripetizione del test Xpert

- Xpert C. difficile BT
- Xpert MRSA/SA SSTI
- Xpert vanA/vanB

Per istruzioni dettagliate, avvertenze e precauzioni fare riferimento al foglietto illustrativo.

Per una copia della SDS, consultare il sito:
www.cepheid.com o
www.cepheidinternational.com

Assistenza Tecnica di Cepheid
Ufficio USA
+1 (888) 838-3222, opzione 2
techsupport@cepheid.com

Ufficio europeo
+33 563 825 319
support@cepheideurope.com

Seguire questa procedura di ripetizione del test entro 3 ore dopo un **ERRORE (ERROR)**, **NON VALIDO (INVALID)**, o **NESSUN RISULTATO (NO RESULT)**.


Altrimenti:
Ripetere il test con il campione rimanente se il volume è sufficiente oppure
Raccogliere un nuovo campione e trattare il campione in base al foglietto illustrativo.



- 1 Trattenere la cartuccia utilizzata. Ottenere una nuova cartuccia Xpert e un nuovo flaconcino di reagente per il campione.



- 2 Trasferire tutto il contenuto rimanente dalla camera del campione della cartuccia usata a un nuovo flaconcino di reagente per il campione.

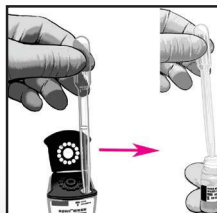

- 3 Chiudere il flaconcino di reagente per il campione e miscelare con il vortex per 10 secondi.



- 4 Aprire il coperchio della nuova cartuccia Xpert.



- 5 Aspirare l'intero contenuto del flaconcino di reagente per il campione con una pipetta di trasferimento monouso.



- 6 Svotare la pipetta nella camera del campione.



- 7 Chiudere il coperchio della cartuccia Xpert e iniziare il test entro l'intervallo di tempo specificato nel foglietto illustrativo.

